



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS**

**LM-140**



TD-07-ES-140-08-23-V01

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*

















# INDHOLDSFORTEGNELSE

Forklaring af symboler .....	Side 4-5
Introduktion .....	Side 6
Sikkerhed/Forholdsregler .....	Side 7
Sådan oplader du din Lindebjerg elscooter .....	Side 8
Instrumentbord .....	Side 10
Sæde og opladning.....	Side 11
Sådan folder du din LM-140.....	Side 12
Få mere ud af dit batteri .....	Side 13
Batteri og frikopling .....	Side 14
El-scooteren.....	Side 15
Fejlsøgning .....	Side 16
Tekniske specifikationer.....	Side 17
Garanti og service.....	Side 18
Serviceskema.....	Side 19

# FORKLARING AF SYMBOLER

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Fabrikant		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
CE- mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er i overensstemmelse med alle relevante EU lovkrav til medicinsk udstyr	Mærkat Brugermanual
Medicinsk udstyr		Produktet er medicinsk udstyr klasse 1	Mærkat
Brugermanual		Læs brugsanvisning inden brug!	Mærkat Brugermanual
Reference nummer		Internt varenummer	Mærkat
Lot nummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Serienummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Belastning		Max brugervægt	Mærkat
Afskaffelse		Produktet må ikke smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt.	Mærkat

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Frikopling		Frikopling af motorbremse	Mærkat
Tilkopling		Tilkopling af motorbremse	Mærkat
Batteri		Tilkopling af batteri poler	Mærkat
Batteri		Sæt ikke metal på batteripolerne	Mærkat
Batteri		Hold altid batteripolerne rene, for at undgå en dårlig forbindelse.	Mærkat



# INTRODUKTION







Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarseloplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

## Mærkat

<b>Elscooter LM-140</b>		TD-ES-140-01-23-V01	
<b>REF</b> 121002 / 03	Max. belastning: 100 kg		
<b>LOT</b> ES-2308-4073	Egenvægt: 40 kg		
<b>SN</b> FFAU4367825	Hastighed: 6 km/t		
 Max. brugervægt: 100 kg	Batteri: 12 volt AGM - Gastæt blybatteri		

      **LINDEBJERG A/S**  
Stensgaardvej 14,  
DK-5500 Middelfart  
[www.lindebjerg.dk](http://www.lindebjerg.dk)

## Produktsortiment

Produktnavn	Varenr.
LM-140 - Rød	121002
LM-140 - Blå	121003

# SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

## Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Kør aldrig over 6 km/t på fortov, gågader eller indendørs.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

## Batteri instruktioner:

**VIGTIG!** Læs opladningsinstruktionerne på side 8 og 14 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

## Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

### Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.  
Sæt elscooteren til opladning.

### Hver måned:

Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

### Årligt:


Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

# SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

4

## Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som følger med ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

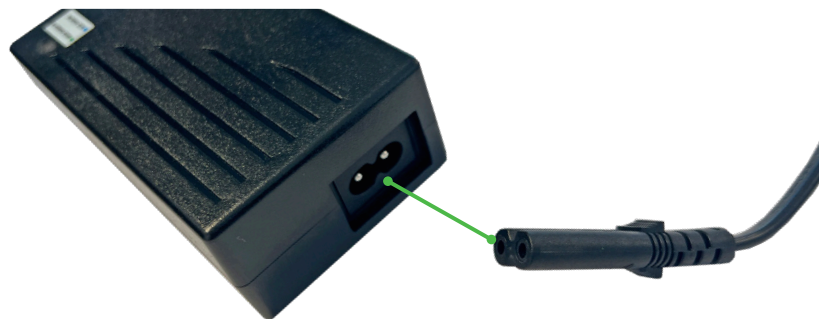

Stik til elscooteren



Stik til almindelig stikkontakt

Oplader LM-140: Oplader 24V, 2A

Opladningen starter af sig selv, når du sætter stikket i. Du vil se opladerens lysdioder blive blå. Når opladningen er fuldendt, vil den blå lysdiode skifte til grøn.



Lysdioder

Du skal sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade scooteren stå til strøm hele tiden.


Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke scooteren stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

*BEMÆRK: Opladeren er ikke bygget til at lade i fugtige miljøer, og kan skade eller ødelægge opladeren.*





# INSTRUMENTBORD

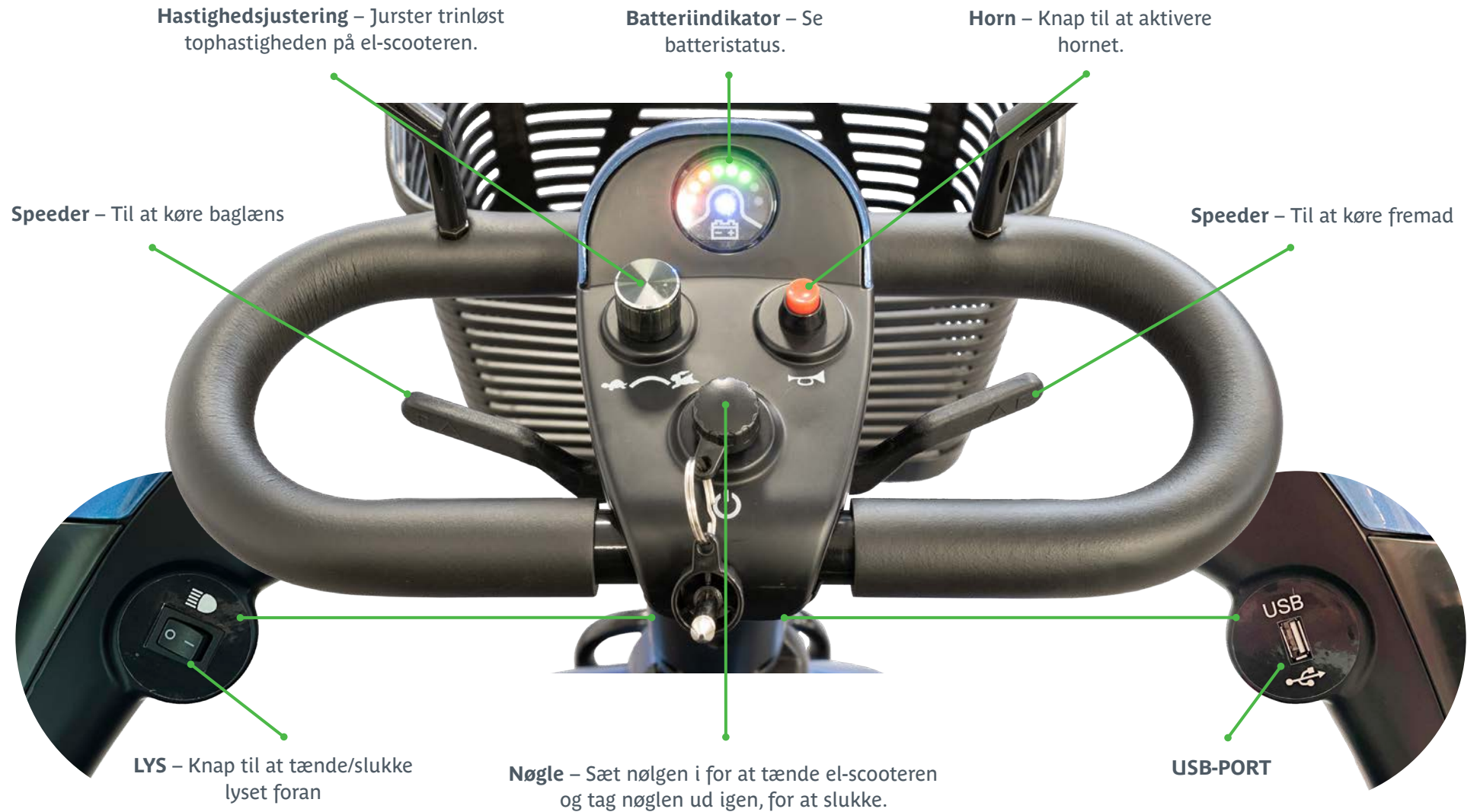

# SÆDE OG OPLADNING

**Ryglæn** – Kan manuelt klappes ned, så sædet fylder mindre.



**Armlæn** – Kan manuelt klappes op

**Bredde mellem armlæn** – Løsne de 2 fingre skruer og du kan jurstere bredden mellem armlænene.

**Drejesæde** – Træk op i dette håndtag, for at dreje sædet. Sædet vil automatisk låse fast igen.

**Knap til nulstilling af batteriet** – Må ikke benyttes



**Stik til opladning af batteri**

# SÅDAN FOLDER DU DIN LM-150

## 1 Afmonter sædet

Træk op i håndtaget under sædet, til at aktivere drejefunktionen. Drej sædet 25 grader, uden at sædet går i lås igen. Løft herefter op i sædet og det vil løsne sig.

Afmonter sæde –  
Løft op i håndtaget  
og drej sædet



## 3 Afmonter kurv

Tryk ind på knappen lige over kurven og løft derefter op i kurven. Derefter vil den komme af. For at montere den igen, skal du blot klikke den ned i beslaget.

Tryk ind her, for at  
tage kurven af



## 2 Afmonter batteri

Løsne fingerskruen bag på batteriet. Herefter kan du tage fat i håndtaget og løfte batteriet af. Husk at gemme skruen, til når du skal montere batteriet igen.

Skruen til at afmontere  
batteriet

Håndtag



## 4 Fold styret ned

Løsne fingerskruen i bunden af styrestammen, herefter kan du ved håndkraft ligge styret ned.

Fingrekrue til at  
løsne styret



## Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu  
klar til  
at køre



# BATTERI OG FRIKOPLING

5

## Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdes frie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens max rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

**HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.**

6

## Frikopling

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scooterens bagkåbe markeret med et "N/D" klistermærke. N = Frikoplet / D = Klar til at køre.

Vigtigt! Håndtaget skal være trukket helt ud, for at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke trukket helt ud, vil scooteren ikke køre. Sluk scooteren, tryk håndtaget hlet ud og tænd igen for scooteren.



# EL-SCOOTEREN



# FEJLSØGNING

Problem	Fejl	Løsning
Scooteren kan ikke køre. Den blinker en gang.	Batterispændingen er for lav.	Sæt scooteren til opladning.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker i batteriindikatoren	Motoren er frikoblet, så du kan skubbe med scooteren.	Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker i batteriindikatoren.	Opladeren er forbundet til scooteren.	Sluk scooteren - Træk stikket ud af scooteren. Vent 2 sek. og tænd igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker i batteriindikatoren.	Speederen er aktiveret for hurtigt eller står ikke neutral.	Sluk scooteren. Tænd herefter igen og vent ca. 2 sek. før speederen aktiveres.
Scooteren stopper pludseligt under kørsel, eller vil ikke tænde.	Dårlig batteriforbindelse.	Tjek batteriet er sat ordenlig på plads og skruet godt fast.
Scooteren taber fart under kørsel.	Dårlig forbindelse i fartpotentiometer.	Drej hastighedsjusteringsknap frem og tilbage, da forbindelsen kan forringes ved sjælden brug.
Scooteren kører kort på en opladning.	Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, blødt underlag, kulde, eller meget start og stop.	Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt underlag. Skift evt. batterierne.
Scooteren vil ikke lade op.	Aflæsningsfejl.	Ladestatus skal ses på selve opladeren.
Scooteren vil ikke lade op, men kører fint.	Sikring er sprunget i opladeren.	Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.
Opladeren virker ikke.	Opladeren får ikke noget strøm.	Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.
Scooteren holder konstant med baglys.	Lyset er parkeringslys og slukkes under kørsel.	Der er ikke tale om en fejl.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål L/B/H	1030mm/500mm/840mm
Sædehøjde	520mm
Sædebredde	430mm
Sædedybde	350mm
Armlæn højde	210mm
Vægt samlet	40kg
Vægt foldet (tungeste del)	24,1kg
Maks hastighed	6 km/t
Bremselængde	1.1 m (tør overflade)
Venderadius	2,20 m
Rækkevide	Op til 15km
Max Stigning	9 grader
Motor Effekt	24V / 180W
Batterier	12V/12AH *2
Hjulstørrelse	D 192mm
Maks ampere på oplader	2A

# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremseser, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, medmindre andet er angivet på din sluseddél. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. serviceinterval-lerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din sluseddél/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affjedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjergs produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.