



Vi sælger livskvalitet



BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS

KABINESCOOTER  
COUNTRY II  
4 HJUL

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG KABINESCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for, at du får glæde af alle de smarte funktioner kabinescooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til, at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion .....	Side 4
Sikkerhed/forholdsregler.....	Side 5
Batteri informationer .....	Side 6
Opladning.....	Side 7
Sådan betjener du din Country II.....	Side 8
Få mere ud af dit batteri .....	Side 11
Display.....	Side 12
Funktioner .....	Side 13
Display, USB & Bluetooth.....	Side 14
Display knapper .....	Side 15
Så langt kører din kabinescooter .....	Side 16
Garanti og service.....	Side 18
Serviceskema.....	Side 19

# INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.r



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskaade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

## Produktsortiment

Produkt navn	Varenr.
Country II 4-hjulet - Rød - 45 km/t	136021
Country II 4-hjulet - Blå - 45 km/t	136019

# SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

## Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Sikkerhedsselen skal anvendes under kørsel, både af fører og passager.
- Køretøjet kræver kørekort
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

## Batteri instruktioner:

**VIGTIG!** Læs opladningsinstruktionerne på side 6 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal du enten frakoble og tilkoble opladeren hver dag eller skal hovedsikringen slås fra. Læs mere på side 6.

Hvis køretøjets batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

## Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på dit køretøj, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

### Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.

Sæt kabinescooteren til opladning.

Tag ladestikket ud af kabinescooteren og vent 30 sekunder. Herefter monter ladestikket i kabinescooteren igen.

### Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.

Rengør plastikskjolde med en fugtig klud.

### Årligt:

Det anbefales at få serviceret dit køretøj af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis dit køretøj er ny, skal dit køretøj serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på køretøjet, herefter med 12 måneders interval.

# BATTERI INFORMATIONER

## Generelle informationer

Dit køretøj er forsynet med 12V vedligeholdes frie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre i dit køretøj. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå max rækkevidde, som du kan læse i køretøjets specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil køretøjet bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved bykørsel vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes køretøjets rækkevidde.

**HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.**

## Opbevaring af kabinescooter, hvis den ikke er i brug i længere tid

Skal du ikke bruge din kabinescooter i længere tid, så er det vigtigt at du læse dette afsnit. Når kabinescooteren ikke bruges i længere tid, er der chance for at batterierne bliver ødelagt, hvis du ikke gør det korrekt.

### Mulighed 1:

Det er ikke nok blot at lade kabinescooteren stå til strøm i en længere periode. Når kabinescooteren er fuldt opladt, så slår opladeren fra og starter ikke igen. Derfor er det vigtigt, at du tage laderen ud af kabinescootere, venter 30 sekunder og herefter sætter stikket i igen dagligt. Har du ikke mulighed for dette, skal du gå til „Mulighed 2“.

### Mulighed 2:

Har du ikke mulighed tilslutte laderen dagligt, skal du slå hovedsikringen fra i kabinescootere. (Kabinescooteren må maks stå med hovedsikringen slået fra i 14 dage uden strøm. For ikke at ødelægge batterierne.)

## Hovedsikringen

Hovedsikringen sidder til højre for bagsædet i kabinescooteren. Her skal begge kontakter sættes på „OFF“.



# SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG KABINESCOOTER

**HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel. Fjern altid opladeren før kørsel.**

## Opladning

For at genoplade køretøjets batterier skal du benytte den medfølgende oplader, som følger med ved levering. Forbind opladningshåndtaget i stikket bag opladningsklappen, bag på kabinescooteren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

*BEMÆRK! Bruger du en forlængerledning, skal du være ekstra opmærksom på samlingen mellem opladeren og forlængerledning ikke bliver udsat for vand og fugt.*



**Ladekabel : 135178 - Ladekabel til Urban/Country 230V**

Du skal sætte køretøjet til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Efter en fuld opladning, vil opladeren ikke automatisk starte igen. Her skal du tage opladestikket ud af kabinescooteren og vente i 30 sekunder. Herefter skal du sætte opladestikken i kabinescooteren igen. Dette skal du gøre dagligt. Skal

du ikke køre i kabinescooteren i længere tid eller ikke har mulighed for dette, så læs side 6.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke køretøjet stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du slukke for dit køretøj. Køretøjets batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

## Strømindikator

På opladningshåndtaget, sidder er en rød lysdiode. Denne diode indikerer om der er sat strøm til opladeren. Er der strøm til opladeren, lyser den rødt. Er der ikke strøm til opladeren lyser den ikke. Strømindikatoren vil altid lyse rødt, ligemeget om kabinescooteren er fuldt opladt eller ej.





# SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG COUNTRY II – 4 HJUL

**Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – Tjek at du har det korrekte luftryk i dine Dæk ( 2 – 2,5 bar ) og at lys, bremses og styretøj fungerer NØGLEN SKAL ALTID SIDDE I RATLÅSEN, NÅR DU KØRER I DIN KABINESCOOTER. ELLERS KAN DU RISIKERE, AT DEN LÅSER RATET NÅR DU KØRER.**

**1** Før du kører din første tur er det vigtigt at du har ladet køretøjet op. Dette gøres med den medfølgende oplader. Opladeren forbindes imellem en almindelig 230V stikkontakt og scooterens lade stik som du finder bag dækslet imellem de to baglygter. Scooteren stopper selv opladningen når den er fuld opladt. Vi anbefaler du opladere scooteren efter hver køretur. Husk af afmonter opladeren før du kører.

**2** Åbning af dør: Din scooter er udstyret med fjernbetjent centrallås, så du kan med knapperne på nøglen, låse scooteren op fra afstand. Tryk på knappen med symbolet "åben hængelås" for at låse op og " Lukket hængelås" for at låse. Har du ikke fjernbetjent centrallås, benyttes nøglen i dørens nøglehul.

**3** Indstilling af sæde: Du har mulighed for, at indstille sædet så det passer bedst muligt til dig. På højre side af sædebunden finder du håndtaget til justering af sæderykken. Træk op i håndtaget og indstil sæderykken så den passer til dig. På sædebundens forkant finder du håndtaget til justering af sædets længderetning. Træk op i håndtaget og juster sædet frem eller tilbage. OBS! Det er nemmets at justere sædet imens du sidder på sædet.

**4** Tænd scooteren ved at sætte nøglen i tændingslåsen bag rattet. Drej nøglen væk fra dig selv og der vil komme lys i displayet.



**5** Vælg gear – Du skal nu vælge om du ønsker at kører frem eller bakke. Drej knappen til venstre mod D for at kører frem og drej knappen til højre mod R for at bakke. Du kan se hvilket gear du har valgt nederst i displayet. Sættes Gearvælgeren i "N" har du valgt frigear og det vil ikke være muligt at køre hverken frem eller tilbage. Displayet vil aktivere scooterens bakkamera og du vil kunne se hvad der måtte være af forhindringer i displayet.



6

Kørestil. Scooteren har 3 forskellige køremønstre. ECO, Normal og Sport.

Sport



Ønsker du at køre i indstillingen "normal" skal du ikke foretage dig noget valg. Ønsker du at køre i ECO, som er mere energibesparende og dermed med lidt lavere tophastighed trykker du på knappen markeret med "ECO". Ønsker du at køre i "Sport" som giver en hurtigere acceleration trykker du på knappen markeret "Sport".

7

Husk lyset før du kører.



Lys

Blænde  
op/ned

Lys

Blinklyset

ECO



Drej knapperne markeret med "Lys" for at tænde for lyset – Skub pinden markeret "blænde op/ned" imod dig selv og væk fra dig selv, for at tænde og slukke det lange lys. Pinden markeret med "blinklyset" benyttes til at aktiverer blinklyset – Skub pinden op for, at blinke til højre og skub ned for at blinke til venstre. Skub pinden tilbage i midterste position for at slukke blinklyset, hvis den ikke gør det automatisk, når du har drejet. Du kan se om scooteren blinker i displayet.

8

## Håndbremsen

Den finder du i gulvet til højre for sædet skal ligges ned så den ligger flat med gulvet. Når du har gjort det, er alle bremsen er nu frikoblet. Vigtigt! Ønsker du at bremse under kørslen, skal du bruge fodbremsen. Brug ikke håndbrems i gulvet under kørsel – Denne er kun en parkeringsbremse.

Træd nu forsigtigt på speederen – Du kan nu mærke at scooteren begynder at køre. Jo mere du træder på speederen, jo mere øges hastigheden på scooteren. Ønsker du at stoppe slippes speederen og træd på fodbremsen. Først når du holder helt stille og ønsker at parkere aktivere du håndbremsen i gulvet.

9

## Komfortfunktioner (Varme / Blæser)

Du har to blæsefunktioner til rådighed i din Country II. Tryk på knappen til højre for at blæse frisk luft ind i kabinen. Tryk på knappen til venstre hvis du ønsker frisk luft med varme.



10

## Visker, sprinkler og horn

Du aktiverer scooterens visker ved at skubbe pinden markeret "Visker" op for at tænde og ned for at slukke. Der er 3 hastighedstrin, jo højere op du skubber den, jo hurtigere visker den.



Ønsker du sprinklerfunktionen, skal du skubbe pinden på højre side af rattet imod dig selv og holde den der, indtil der er nok sprinklervæske på vinduet. Slip igen for at stoppe.

For at aktivere hornet, skal du trykke på midten af rattet.

11

## Parkering

Når du har parkeret din scooter og trukket håndbremsen i gulvet, drejer du nøglen bag rattet mod dig selv og tager den ud. Nu vil dørene låse op og du kan forlade køretøjet.

Skulle du være løbet tør for strøm er det muligt at låse døren op manuelt med den røde knap du finder i dørhåndtaget.

12

## Sprinklervæske

Du finder sprinklervæske tanken bag frontlogoet



13

## Udvendig opmagasineringsrum

OBS! Opbevaringsrummet med tilgang udefra kabinens bagende, er ikke vandtæt og vand/fugt vil forekomme. Bør derfor kun benyttes til lade kabel m.m..



## Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu  
klar til  
at køre




# DISPLAY

**Speedometer** – Her ser du scooterens hastighed – Dette angives både med pilen og med tal i midten af instrumentet.

**Lydstyrke** - Lydstyrken justere på de små knapper i bunden af displayet

**Bluetooth** – Bluetooth aktiveres via din mobiltelefon.

**Batteri** – Her ser du batteri indikatoren til venstre i displayet viser det aktuelle batteriniveau.

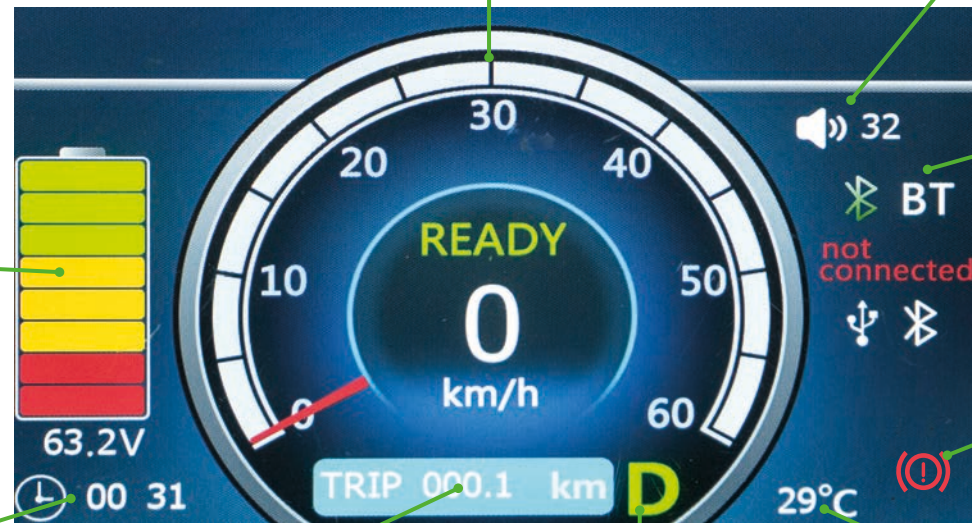

**Håndbremse** – Symbolet viser at håndbremsen i gulvet er aktivret.


**Timer** – Viser hvor lang tid du har kørt.

**Triptæller** – Triptælleren vil starte med at vise dig hvor langt din scooter har kørt i alt. Dernæst viser den hvor langt du har kørt på den pågældende tur.

**Gearindstilling** – Her ser du hvilket gear du har valgt.  
D=Frem – N=frigear – R=bak

**Termometer** – Viser temperaturen i kabinen.


# FUNKTIONER

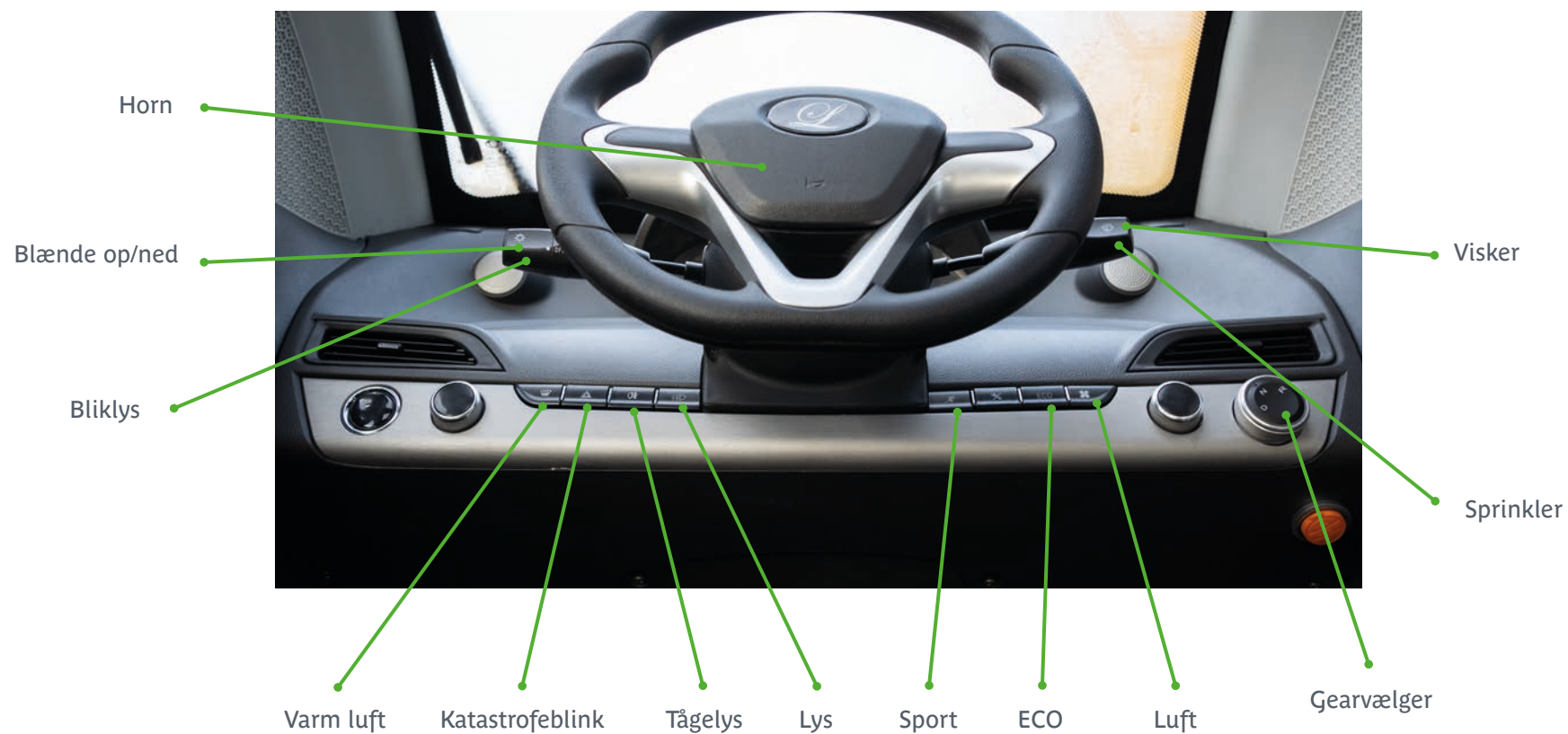

# SÅDAN KONTROLLERER DU DISPLAYET, USB OG BLUETOOTH

13

## Lås knapperne op

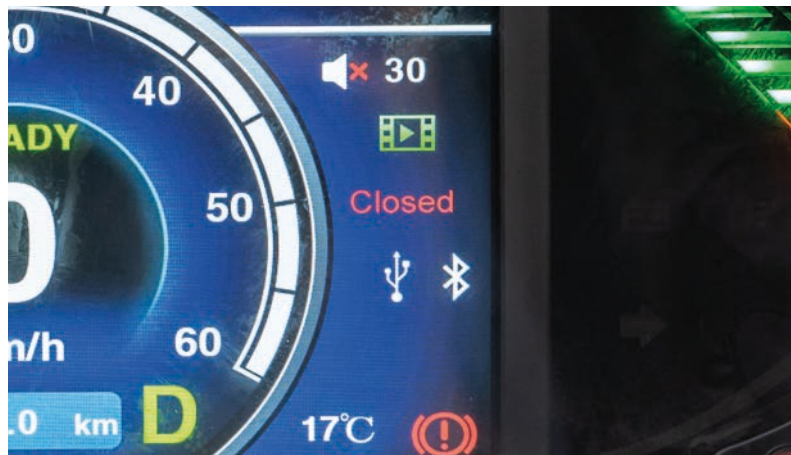

Lyser knapperne rødt og den skriver „Closed“ med rødt skrift i displayet, så er alle knapperne låst og du kan ikke bruge dem. For at låse knapperne op, skal du holde „Afspil/pause“ (se næste side) knappen inde i 5 sekunder, herefter vil knapperne lyse blå, så du kan se de er låst op. Du kan ligeledes låse dem igen, ved at holde „Afspil/pause“ knappen nede i 5 sekunder og de vil lyse rødt igen.

Når knapperne lyser blå, kan du bruge knapperne og skrue op og ned for lyden eller sætte op lydløs.

14

## Bluetooth

Når du tænder din kabinescooter, vil bluetooth automatisk være aktiveret. Du skal bare finde din telefon, åbne bluetooth indstillingerne og forbinde til „CJ-ZJ-BT“. Herefter kan du afspille musik på din telefon og det vil blive spillet i højttalerne i din kabinescooter.

Kommer der ikke lyd ud af højttalerne, så husk og tjek, at den ikke er lydløs og at den står på det rigtge medie. Du kan skifte medie med „Skift medie“ knappen. (Se næste side)

15

## USB



Du finder USB indgangen under gearvælgeren. Her kan du indsætte et USB stik, med musik på og høre det på højttaleren. Kommer der ikke lyd ud af højttalerne, så husk og tjek, at den ikke er lydløs og at den står på det rigtge medie. Du kan skifte medie med „Skift medie“ knappen. (Se næste side)



# DISPLAY KNAPPER



**Afspil/pause knap (Lås op knap)** – Afspiller du lyd fra USB eller bluetooth, kan du pause og afspille. Skriver den „Closed“ i display, så er alle knapperne låst. For at låse op, skal du holde denne knap nede i 4 sekunder.

**Skift medie** – Denne knap bruger du til at skifte imellem bluetooth og USB lyd.

Lyd ned

Lyd op

Lydløs

# SÅ LANGT KØRER DIN KABINESCOOTER

COUNTRY II 4-HJULET (45 KM/T) 3000 W

STANDARD 72V - 45AH X 6

PREMIUM 72V - 58AH X 6

Perfekte forhold

OP TIL 60 KM

OP TIL 80 KM

Skærpede forhold

OP TIL 45 KM

OP TIL 60 KM

Hårde forhold

OP TIL 30 KM

OP TIL 40 KM

## PERFEKTE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "PERFEKTE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: VINDSTILLE  
VÆGT: 80 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 20 °C  
DÆKTRYK: ANBEFALET  
TERRÆN: FLADT  
KØRSEL: LANDEVEJ

## SKÆRPEDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "SKÆRPEDE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: < 5 M/S  
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 8 °C  
DÆKTRYK: ANBEFALET  
TERRÆN: FLADT  
KØRSEL: BYKØRSEL

## HÅRDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "HÅRDE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: < 10 M/S  
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 0 °C  
DÆKTRYK: LAVT DÆKTRYK  
TERRÆN: KUPERET  
KØRSEL: BYKØRSEL





# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige kabinescooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garanti-perioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikre dig, at du ikke skal undvære din kabinescooter i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din kabinescooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din kabinescooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.