



Vi sælger livskvalitet



BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS

KABINESCOOTER
FREEDOM 4

TD-KS-FREEDOM-4-01-25-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG KABINESCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de smarte funktioner kabinescooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion	Side 4
Sikkerhed/forholdsregler.....	Side 5
Batteri informationer	Side 6
Opladning.....	Side 7
Sådan betjener du din Freedom 4	Side 8
Styr funktioner	Side 12
Instrumentbord	Side 13
Display.....	Side 14
Få mere ud af dit batteri	Side 15
Display, USB & Bluetooth.....	Side 16
Så langt kører din kabinescooter	Side 20
Teknisk info	Side 21
Garanti og service.....	Side 22
Serviceskema.....	Side 23

INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskaade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

Produktsortiment

Produkt navn	Varenr.
Kabinescooter Freedom Luksus - 45 km/t 4 hjul sølv	137007
Kabinescooter Freedom Luksus - 45 km/t 4 hjul sølv	137006

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Sikkerhedsselen skal anvendes under kørsel, både af fører og passager.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

Batteri instruktioner:

VIGTIG! Læs opladningsinstruktionerne på side 6 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal du enten frakoble og tilkople opladeren hver dag eller skal hovedsikringen slås fra. Læs mere på side 6.

Hvis køretøjets batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på dit køretøj, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.

Sæt kabinescooteren til opladning.

Tag ladestikket ud af kabinescooteren og vent 30 sekunder. Herefter monter ladestikket i kabinescooteren igen.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.

Rengør plastikskjolde med en fugtig klud.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret dit køretøj af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis dit køretøj er nyt, skal dit køretøj serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på køretøjet, herefter med 12 måneders interval.

BATTERI INFORMATIONER

Generelle informationer

Dit køretøj er forsynet med 12V vedligeholdelsesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre i dit køretøj. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå max rækkevidde, som du kan læse i køretøjets specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil køretøjet bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved bykørsel vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes køretøjets rækkevidde.

HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.

Opbevaring af kabinescooter, hvis den ikke er i brug i længere tid

Skal du ikke bruge din kabinescooter i længere tid, så er det vigtigt at du læse dette afsnit. Når kabinescooteren ikke bruges i længere tid, er der chance for at batterierne bliver ødelagt, hvis du ikke gør det korrekt.

Mulighed 1:


Det er ikke nok blot at lade kabinescooteren stå til strøm i en længere periode. Når kabinescooteren er fuldt opladt, så slår opladeren fra og starter ikke igen. Derfor er det vigtigt, at du tager laderen ud af kabinescootere, venter 30 sekunder og herefter sætter stikket i igen dagligt. Har du ikke mulighed for dette, skal du gå til „Mulighed 2“.

Mulighed 2:

Har du ikke mulighed for tilslutte laderen dagligt, skal du slå hovedsikringen fra i kabinescootere. (Kabinescooteren må maks stå med hovedsikringen slået fra i 14 dage uden strøm. For ikke at ødelægge batterierne.)

Hovedsikringen

Hovedsikringen sidder til højre for førersædet og under håndbremsen i kabinescooteren. Her skal kontakten sættes på „OFF“.

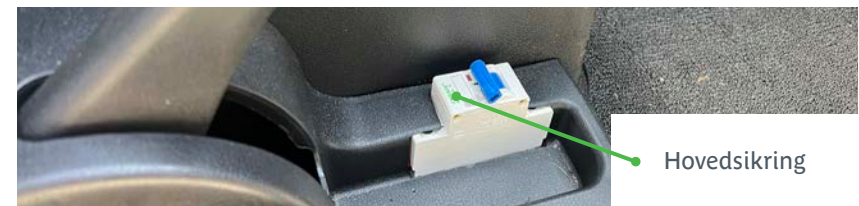

SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG KABINESCOOTER

HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel. Fjern altid opladeren før kørsel.

Opladning

For at genoplade køretøjets batterier skal du benytte den medfølgende oplader, som følger med ved levering. Forbind opladningshåndtaget i stikket bag opladningsklappen, bag på kabinescooteren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

BEMÆRK! Bruger du en forlængerledning, skal du være ekstra opmærksom på samlingen mellem opladeren og forlængerledning ikke bliver udsat for vand og fugt.



Ladekabel : 135178 - Ladekabel til Urban/Country 230V

Du skal sætte køretøjet til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Efter en fuld opladning, vil opladeren ikke automatisk starte igen. Her skal du tage opladestikket ud af kabinescooteren og vente i 30 sekunder. Herefter skal du sætte opladestikken i kabinescooteren igen. Dette skal du gøre dagligt. Skal

du ikke køre i kabinescooteren i længere tid eller ikke har mulighed for dette, så læs side 6.

Under opladning skal du slukke for dit køretøj. Køretøjets batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

Strømindikator

På opladningshåndtaget, sidder er en rød lysdiode. Denne diode indikerer om der er sat strøm til opladeren. Er der strøm til opladeren, lyser den rødt. Er der ikke strøm til opladeren lyser den ikke. Strømindikatoren vil altid lyse rødt, ligemeget om kabinescooteren er fuldt opladt eller ej.



SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG FREEDOM 4

Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – Tjek at du har det korrekte lufttryk i dine Dæk (2 – 2,5 bar) og at lys, bremses og styretøj fungerer

1

Før du kører din første tur, er det vigtigt at du har ladet køretøjet op. Dette gøres med det medfølgende oplader. Opladeren forbindes imellem en almindelig 230V stikkontakt og scooterens lade stik som du finder bag dækslet imellem de to baglygter. Scooteren stopper selv opladningen når den er fuld opladt. Vi anbefaler du opladere scooteren efter hver køretur. Husk af afmonter opladeren før du kører.

2

Åbning af dør: Kabinescooteren er udstyret med fjernbetjent central-lås, så du kan med knapperne på nøglen, kan låse scooteren op fra afstand. Tryk på knappen med symbolet "åben hængelås" for at låse op og "lukket hængelås" for at låse. OBS! Er kabinescooteren løbet tør for strøm eller der er slukket på hovedsikringen, så virker centrallåsen ikke. Så skal du benytte den fysiske nøgle.

3



4

Indstilling af sæde: Du har mulighed for at indstille sædet så det passer bedst muligt til dig. På højre side af sædebunden finder du håndtaget til justering af sæderykken. Træk op i håndtaget og indstil sæderykken så den passer til dig.



På sædebundens forkant finder du håndtaget til justering af sædets længderetning. Træk op i håndtaget og juster sædet frem eller tilbage. OBS! Det er nemmets at justere sædet imens du sidder på sædet.



5

Tænd kabinescooteren ved at holde fødbremsen nede imens du holder „Start/stop“ knappen nede i 4 sekunder og der vil komme lys i displayet. Når der står „Ready“ i toppen af displayet. Er den klar til at køre. Tryk igen på „Start/stop“ knappen for at slukke scooteren igen.



6

Vælg gear – Du skal nu vælge om du ønsker at køre frem eller bakke. Drej på knappen for at vælge. Den røde lysdiode, vil vise hvilket gear du er i.

- D** = Fremad gear
- N** = Neutral / Frigear
- R** = Bakgear

Displayet vil automatisk aktivere scooterens bakkamera, når du sætter den i R og du vil kunne se hvad der måtte være af forhindringer i displayet.



7

Parkering – Når du har parkeret kabinescooteren, skal du huske at aktivere håndbremsen. Så kabinescooteren ikke triller væk. Håndbremsen sidder på højre side af førersædet.

Tryk ind på knappen på spidsen har håndbremsen, så at lægge håndbremsen ned igen.



7

Opladnings indikator – Lige ved siden af håndbremsen, sidder opladnings indikatoren. Her kan du se kabinescooterens batteristatus under opladning. (Lys kun, når opladeren er tilsluttet).

- Grøn = 100%
- Gul = Over 80%
- Rød = Under 80%


Når den lyser grøn, er kabinescooteren fuldt opladt, men di kan roligt lade opladeren sidde i. Opladeren slår automatisk fra.




- 7** Sprinklervæske – Påfyldning af sprinklervæske
På venstre side af kabinescooteren mellem sideruden og foruden (indvendig), er der et dæksel med et sprinklerikon på. Tag dækslet af og påfyld sprinklervæske her.



- 8** Fodbremse – Kabinescooteren er udstyret med hydrauliske skivebremser, både foran og bagpå. Bruger du fodbremsen, bremser den både på bremserne foran og bagpå.

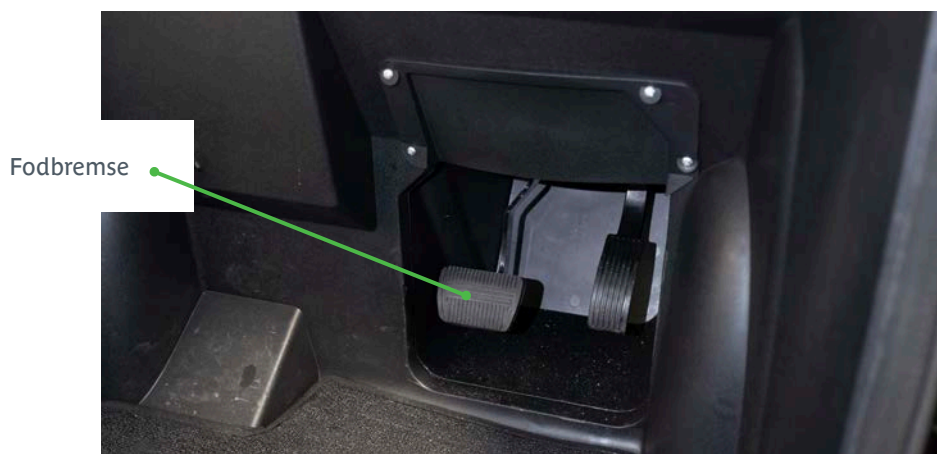

- 8** Dørhåndtag og elruder
På begge døre i kabinescooteren, sidder der et dørhåndtag, en lås knap og en knap til elruden.

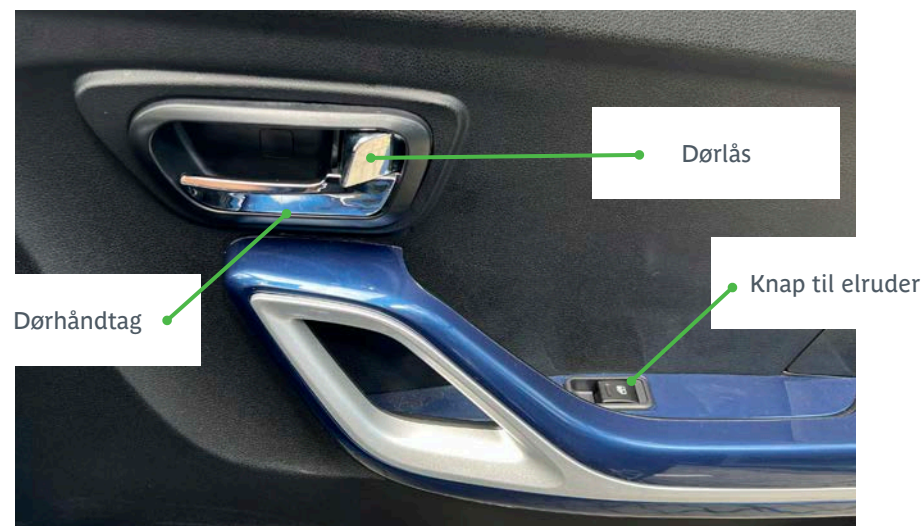


- 9** USB – til opladning af telefon og musik/video
Under gearvælgeren, finder du en USB-indgang, under en orange låg. Dette USB-stik, kan du bruge til at oplade din telefon eller indsætte et USB-stik med musik eller video på og afspille det over kabinescooterens højtalere. Læs mere om afspilning på side 16.




- 10** Nulstilling af triptæller
Skærmen på kabinescooter er touch, det vil sige, at du bare trykker med din finger. For at nulstille triptælleren skal du blot trykke på triptælleren på skærmen, for at nulstille den. Så vil tallet ændring sig til „0“ og begynder og tæller opad på nu.



- 11** Opladerstik
Bag på kabinescooteren sidder oplader stikket. Her åbner du først det yderste dæksel og derefter løfter du op i lade klappen og indsætter oplader kablet. OBS! Husk af fjerne oplader kablet før kørsel.

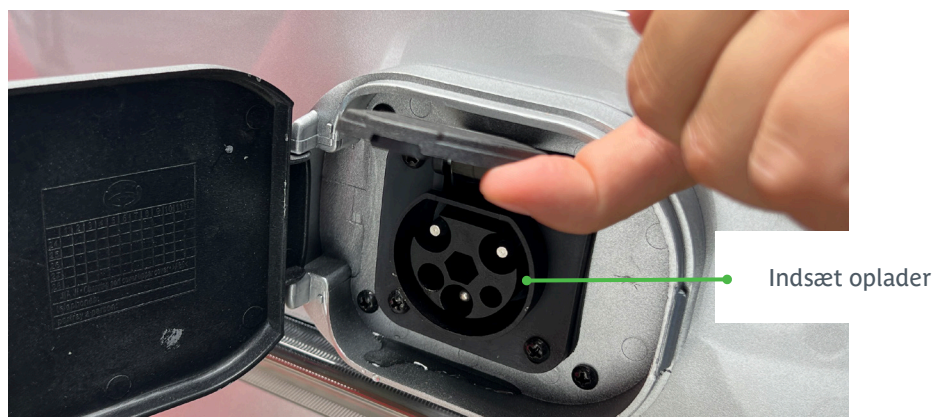

- 12** Bagrude og soltag
Sådan åbner du baggrunden og soltaget. De kan kun åbnes på klem, ved hjælp er håndtaget. Træk først ud i håndtaget. Skub derefter ned på midten af håndtaget.

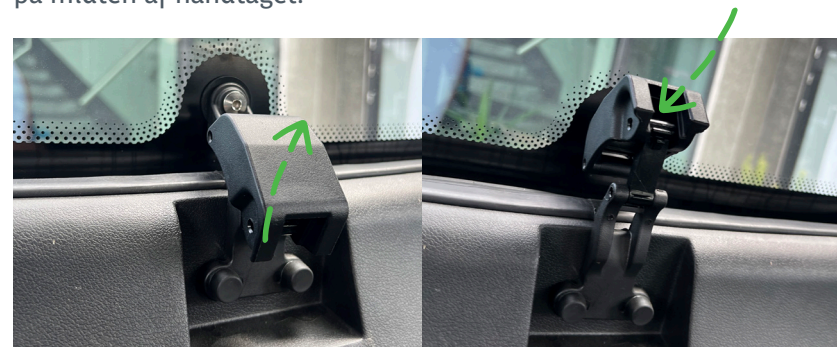

- 13** Lys i loftet
Kabinescooteren er udstyret med en lampe i loftet. Lampen har en knap med 3 funktioner. Brug knappen til at vælge mellem 1. Altid slukket – 2. Kun tændt når døren er åben – 3. Altid tændt.



STYR FUNKTIONER

Lys - Drej på spidsen af blinklysarmen

OFF = Lys slukket

☞☞ = Positionslys

☞☞☞ = Kørellys

Fjernlys - Skub blinklysarmen væk fra dig selv, for at aktivere fjernlys. Skub ind mod dig selv, for kort at aktivere fjernlys

Blinklys - Skub blinklysarmen op eller ned, for at aktivere blinklyset

Sprinklervæske - Skub pinden ind med dig selv, for at aktivere sprinklervæsken.

Vinduesvisker - Skub op i pinden, for at aktivere vinduesviskerne.

OFF - Fra

LO - Lav hastighed

HI - Høj hastighed

Horn

INSTRUMENTBORD

Start/stop knap



Blæser
(luft udefra)

Varmeblæser
(til at holde foruden dugfri)

Gearvælger



Tågelys

Katastrofeblink

ECO
(strømbesparende)

DISPLAY



1. Lydstyrke
2. Blink indikator venstre
3. Langt lys indikator
4. Lys indikator
5. Kabinescooter status
6. Positionsls indikator
7. Tægelys indikator
8. Blink indikator højre

9. Sikkerhedssele indikator
10. Batteriniveau
11. Hastighed
12. Total kørte kilometer
13. Batterispænding i volt
14. Gear viser
15. Parkeringsbremse indikator
16. FM-radio


17. USB-musikafspiller
18. Indstillinger
19. USB-videoafspiller
20. Bluetooth musikafspiller
21. Triptæller

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor skal du genoplade batteriet efter hver endt køretur. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

SÅDAN KONTROLLERER DU DISPLAYET, USB OG BLUETOOTH

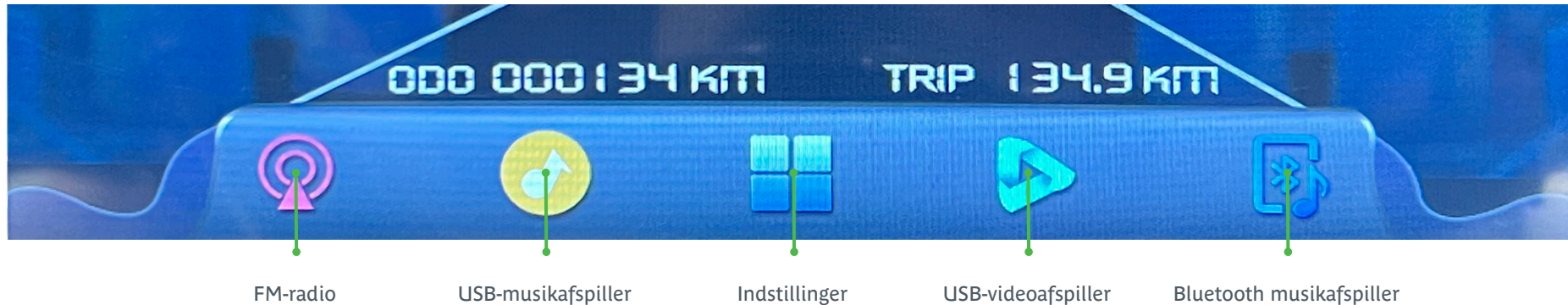

14 Touchskærm

Kabinescooteren er udstyret med en touchskærm, hvilket gør det rigtig nemt at betjene. Du trykker bare med fingeren, på de menu punkter du ønsker at gå ind i. I bunden af skærmen er der vist 5 ikoner, som du kan navigere rundt i mellem.


15 USB

Du finder USB indgangen under gearvælgeren, hvor du kan tilslutte dit USB-stik med video og musik. OBS! Kabinescooteren understøtter ikke alle filformater.



16 Hjem knap og lydløs knap

Når du åbner en af de 5 menupunkter. Vil en hjem knap blive vist. Trykker du på den, kommer du retur til hovedsiden, hvor du kan se de 5 menupunkter. Trykker du en gang på lydløs knappen, vil der blive vist en streg henover ikonet og lyden er slået helt fra.

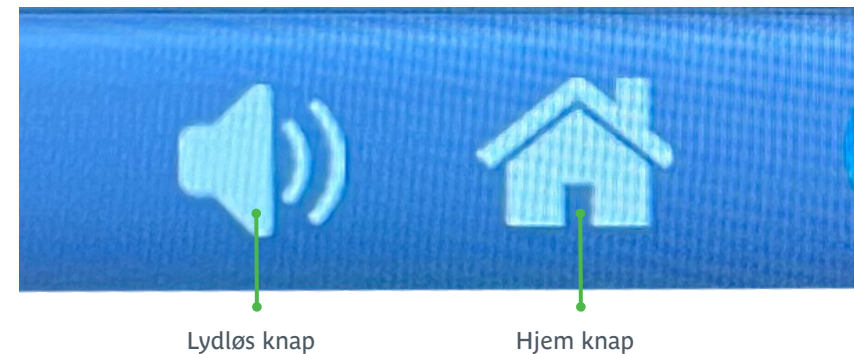


17

FM Radio


Det er begrænset steder i Danmark, at kabinescooteren har mulighed for at modtage FM signaler. Når du trykker på menupunktet „FM Radio“ kommer nedenstående frem til venstre i displayet



Brug enten „næste frekvens“ knappen til at finde den ønskede radio kanal. Eller tryk en gang på „Søg efter kanaler“, herefter vil den stå og søge efter alle tilgængelige radiokanaler. Når søgnings af færdig, vil alle de tilgængelige kanaler bliver vist i bunden af skærmen. Se billede herunder.

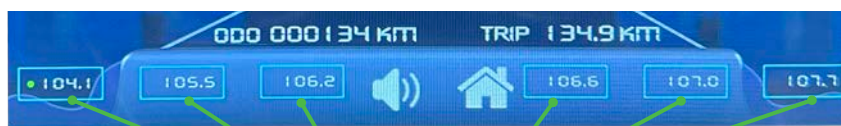

Tilgængelige radiokanaler efter søgning.

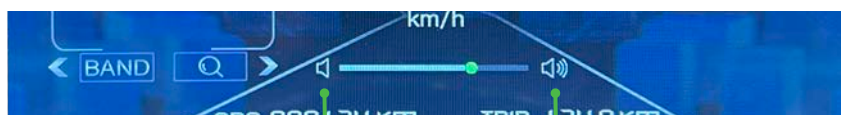

Lyd ned

Lyd op

18

USB musikafspiller

Indsæt først dit USB-stik med musik på. Herefter trykker du på „USB-musikafspiller“ og nedenstående vises til venstre i displayet.




Brug knapperne i bunden af display til at skifte til næste sang, pause, vælge om den skal spille sangene i sløjfe eller blande sangene tilfældigt.


19

Indstilling

Når du vælger menupunktet „Indstillinger“ kan du vælge mellem 2 forskellige indstilling - Sprog og lysstyrke. Vælg mellem de to indstillingsmuligheder i bunden af display.

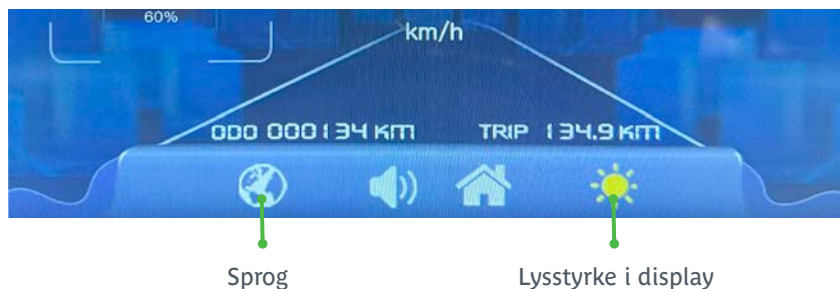

Vælg mellem følgende sprog: (Dansk er ikke en mulighed)

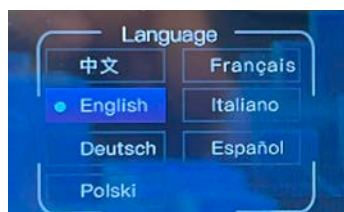

Vælg mellem 100% - 80% - 60% lysstyrke.



20

USB-videoafspiller

Indsæt først dit USB-stik med video på. Herefter trykker du på „Video musikafspiller“. Så begynder video automatisk at spille.


Pause og næste video:

Når videoen spiller, kan du trykke i bunden af skærmen en gang. Så kommer betjeningspanelet frem. Her kan du skifte til næste video, pause eller gå tilbage til hovedmenuen.



Lydstyrke imens videoen spiller:

Når videoen spiller, kan du trykke en gang i toppen af skærmen, så kommer der et panel frem, hvor du kan justere lydstyrken.

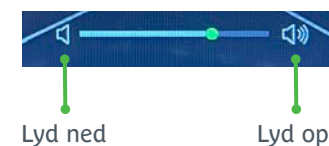

21

Bluetooth musikafspiller

Åben Bluetooth indstillinger på din telefon og find og tilslut til „CAR XT“. Enheden vil altid være synlig, når kabinescooteren er tændt. Når din telefon er tilsluttet, skal du trykke på menupunktet „Bluetooth musikafspiller“. Her kan du afspille musik trådløst fra din telefon. Nedenstående bliver vist i displayet.




22

Handfri telefon

Kabinescooterens skærm, har indbygget handfri telefon. Når du telefon er tilkoblet med Bluetooth, er handfri telefon automatisk aktiveret. Når du ringer til et nummer eller kontakt fra din telefon, vil den automatisk spilles over højttalerne på kabinescooteren.

På skærmen er det muligt at ligge på og tage opkald, så du ikke skal have telefonen i hånden.

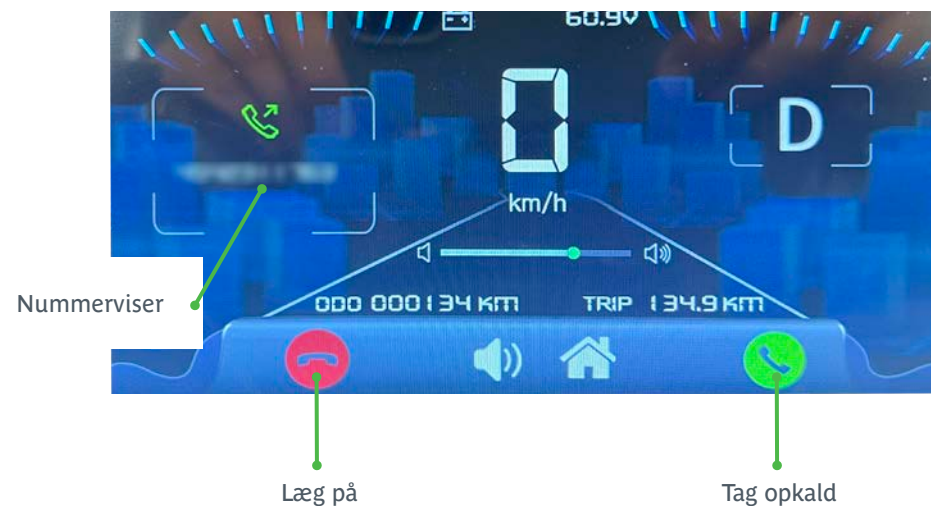

SÅ LANGT KØRER DIN KABINESCOOTER

FREEDOM 4-HJULET
(45 KM/T) 2000 W

STANDARD 60V - 45AH X 6

PREMIUM 60V - 58AH X 6

Perfekte forhold

OP TIL 60 KM

OP TIL 80 KM

Skærpede forhold

OP TIL 45 KM

OP TIL 60 KM

Hårde forhold

OP TIL 30 KM

OP TIL 40 KM

PERFEKTE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "PERFEKTE FORHOLD"
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.

VIND: VINDSTILLE
VÆGT: 80 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE
TEMPERATUR: 20 °C
DÆKTRYK: ANBEFALET
TERRÆN: FLADT
KØRSEL: LANDEVEJ

SKÆRPEDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "SKÆRPEDE FORHOLD"
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.

VIND: < 5 M/S
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE
TEMPERATUR: 8 °C
DÆKTRYK: ANBEFALET
TERRÆN: FLADT
KØRSEL: BYKØRSEL

HÅRDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "HÅRDE FORHOLD"
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.

VIND: < 10 M/S
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE
TEMPERATUR: 0 °C
DÆKTRYK: LAVT DÆKTRYK
TERRÆN: KUPERET
KØRSEL: BYKØRSEL

TEKNISK INFO

Mål	2300x1000x1495 mm
Brændstof	Ren elektrisk
Hjulafstand	1540 mm
Sporbredde	875 mm
Ulastet vægt	290 kg
Oplader type	Indbygget
Bremser (bag)	2 stk. hydrauliske skivebremser
Bremser (foran)	Hydraulisk skivebremse
Antal hjul	4
Dækspecifikation	125/65-12
Motorkraft	2000W

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige kabinescooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikre dig, at du ikke skal undvære din kabinescooter i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din kabinescooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din kabinescooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.