



BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS

LM-450 - LM-700
+ CITY KABINE



TD-07-ES-450-700-CITY-03-24-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forklaring af symboler	Side 4-5
Introduktion	Side 6
Sikkerhed/Forholdsregler	Side 7
Sådan oplader du din Lindebjerg scooter	Side 8
Sådan kører du sikkert Lindebjerg scooter	Side 9-10
Instrumentbord	Side 11-12
Display.....	Side 13
Sådan indstiller du din Lindebjerg scooter	Side 14
Batteri og frikopling	Side 15
Få mere ud af dit batteri	Side 16
Vigtige informationer	Side 17
Sædetype.....	Side 18
City kabinescooter.....	Side 19
Nøglefri betjening (LM650-LM700)	Side 20
Fejlsøgning	Side 21
Garanti og service.....	Side 22
Serviceskema.....	Side 23

FORKLARING AF SYMBOLER

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Fabrikant		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
CE- mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er i overensstemmelse med alle relevante EU lovkrav til medicinsk udstyr	Mærkat Brugermanual
Medicinsk udstyr		Produktet er medicinsk udstyr klasse 1	Mærkat
Brugermanual		Læs brugsanvisning inden brug!	Mærkat Brugermanual
Reference nummer		Internt varenummer	Mærkat
EC REP		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
Serienummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Belastning		Max brugervægt	Mærkat
Afskaffelse		Produktet må ikke smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt.	Mærkat

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Frikopling		Frikopling af motorbremsen	Mærkat
Bortskaffelse		Ved bortskaffelse af produkt	Mærkat
Rygning		Rygning i nærheden af scooteren er forbudt	Mærkat
Åben ild forbudt		Åben ild tæt på scooteren forbudt	Mærkat

INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarseloplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

Mærkat

"Modelnavn"	
	IMPORTØR: LINDEBJERG AS Stensgaardvej 14, DK-5500 Middelfart www.lindebjerg.dk - tlf. 63 15 00 00 SRN nr.: DK-IM 00003926
	SUNGO Cert GmbH Add: Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germany Contact: Frank Xu (Mr) Tel: +49 (0)211 9763413 E-mail: ec.rep@sungogroup.com
   	Varenr. 125001-A / 02-A / 03-A Max. brugervægt: Egenvægt: Hastighed: 15 km/t
UDI	

Produktsortiment

Produktnavn	Varenr.
LM-450 - Rød	124501-A
LM-450 - Blå	124502-A
LM-450 - Grå	124503-A
LM-500 - Rød	125001-A
LM-500 - Blå	125002-A
LM-500 - Grå	125003-A
LM-550 - Rød	125501
LM-550 - Blå	125502
LM-550 - Grå	125503
LM-600 - Rød	126001
LM-600 - Blå	126002
LM-600 - Grå	126003
LM-650 - Rød	126501
LM-650 - Grøn	126504-A
LM-700 - Rød	127001-A
LM-700 - Grøn	127004-A
City kabine - Hvid	131008
City kabine - Rød	131001
City kabine - Grå	131003

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Kør aldrig over 6 km/t på fortov, gågader eller indendørs.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

Batteri instruktioner:

VIGTIG! Læs opladningsinstruktionerne på side 7 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis scooterens batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.
Sæt elscooteren til opladning.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.
Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Årligt:

Det anbefales at få serviceet din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

4


Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som følger med ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.



Oplader LM-450 - LM-550: 111109 - Oplader 24V, 5A
Oplader LM-600 - LM-700 + City: 111112 - Oplader 24V, 8A
Vejrbestandig oplader: 111110 - Oplader 24V, 8A, vejrbestandig

Tryk på "I" på opladerens tænd/sluk knap. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul. Når opladningen er fuldenendt, vil den gule lysdiode skifte til grøn.

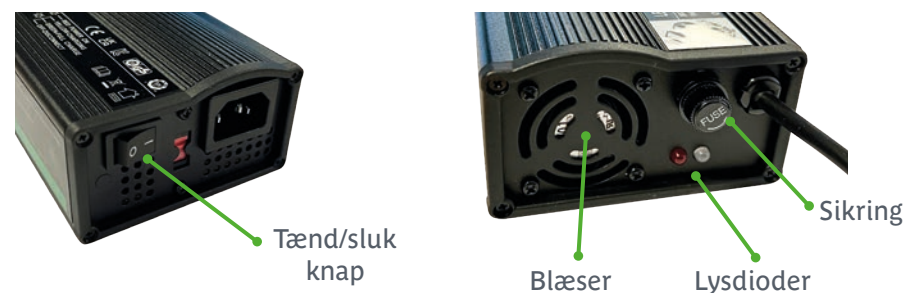

Du skal sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade scooteren stå til strøm hele tiden.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke scooteren stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbestandig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.

SÅDAN KØRER DU SIKKERT LINDEBJERG ELSCOOTER

Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – Tjek at du har det korrekte lufttryk i dine dæk ca. (2,5 – 3 bar) og at lys, bremses og styretøj fungerer

5 Før kørsel:

- Tjek altid at scooteren er slukket, før du sætter dig op på den.
- Tjek at sidespejlene er indstillet korrekt.
- Husk at tage armlænene ned inden kørsel. De kan nemt tages op og ned for nem indstigning på scooteren.
- Har du benyttet drejefunktion på sædet, skal du sikre dig til det er i låst tilstand.

5 Tænd scooteren:

Du tænder nemt scooteren ved at sætte nøglen i tænding og dreje nøglen med uret rundt. Vent herefter 5 sekunder uden at trykke på knapper eller speederen, indtil der kommer lys i displayet. Drej nøglen mod uret for at slukke den igen. (Sluk altid scooteren inden du træder ned.)



6 Lær scooteren at kende

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner.



Bemærk – hvis du trykker stille og roligt vil du opnå en mere jævn kørsel. Undgå at trykke speederen hurtigt helt i bund eller slippe den i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration og en kraftig nedbremsning.



Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

6

Hvor må jeg køre?



Fodgænger
0-6 km/t



Cyklist
6-15 km/t

Cyklist - 6-15 km/t.

Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven, når du kører over 6 km/t. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.

Fodgænger - 0-6 km/t.

Kører du med samme fart som en gående, under 6 km/t, må du køre på fortovet, på fodgængerovergange, i gågader, i butikker og storcentre. Alle steder hvor en fodgænger må færdes.

6

Tegngivning og lys

Bremselys: Når du slipper speederen, vil scooterens bremselys bagpå automatisk tænde. Bremselyset vil være tændt, indtil du trykker ind på speederen igen.

Blinklys: Når du skal dreje, kan du enten vælge at bruge scooterens indbygget blinklys eller du kan vælge at give tegn med hånden. Vi anbefaler at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys. Du tænder scooterens blinklys ved at trykke på henholdsvis pil til venstre og pil til højre. Du slukker blinklyset ved at trykke på pil til venstre og pil til højre endnu en gang.

Kørelys: Da scooteren anses for at være en cykel, skal du køre med lyset tænd i lygtetændingstiden. Det er fra solnedgang til solopgang. Du trykker blot 1 gang på „Tænd/sluk lys“ knappen. Så tænder lyset foran og bagpå. Tryk igen på „Tænd/sluk lys“ knappen for at slukke lyset igen.

OBS! Slukker du scooteren imens lyset er tændt, så går der 30 sekunder og så vil lyset slukke af sig selv.


Blink til venstre


Tænd/sluk lys

Blink til højre




INSTRUMENTBORD

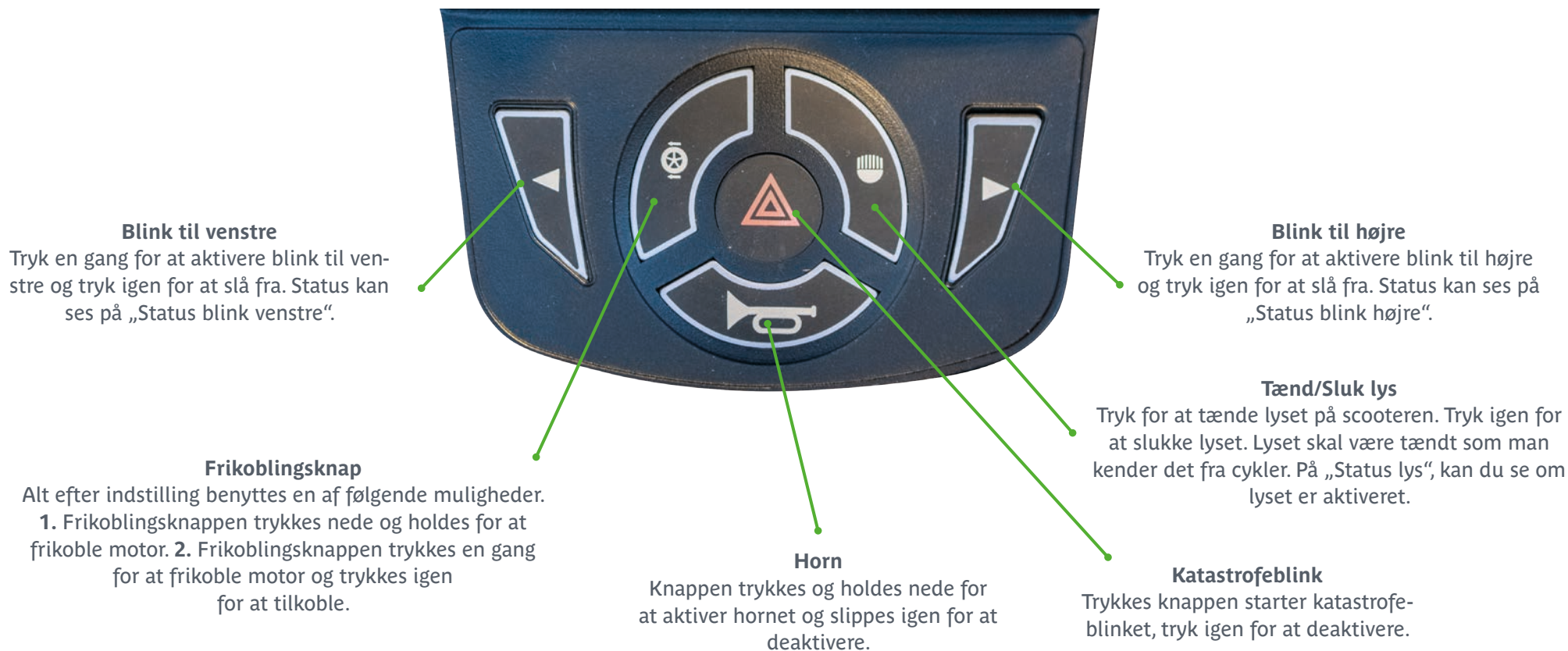

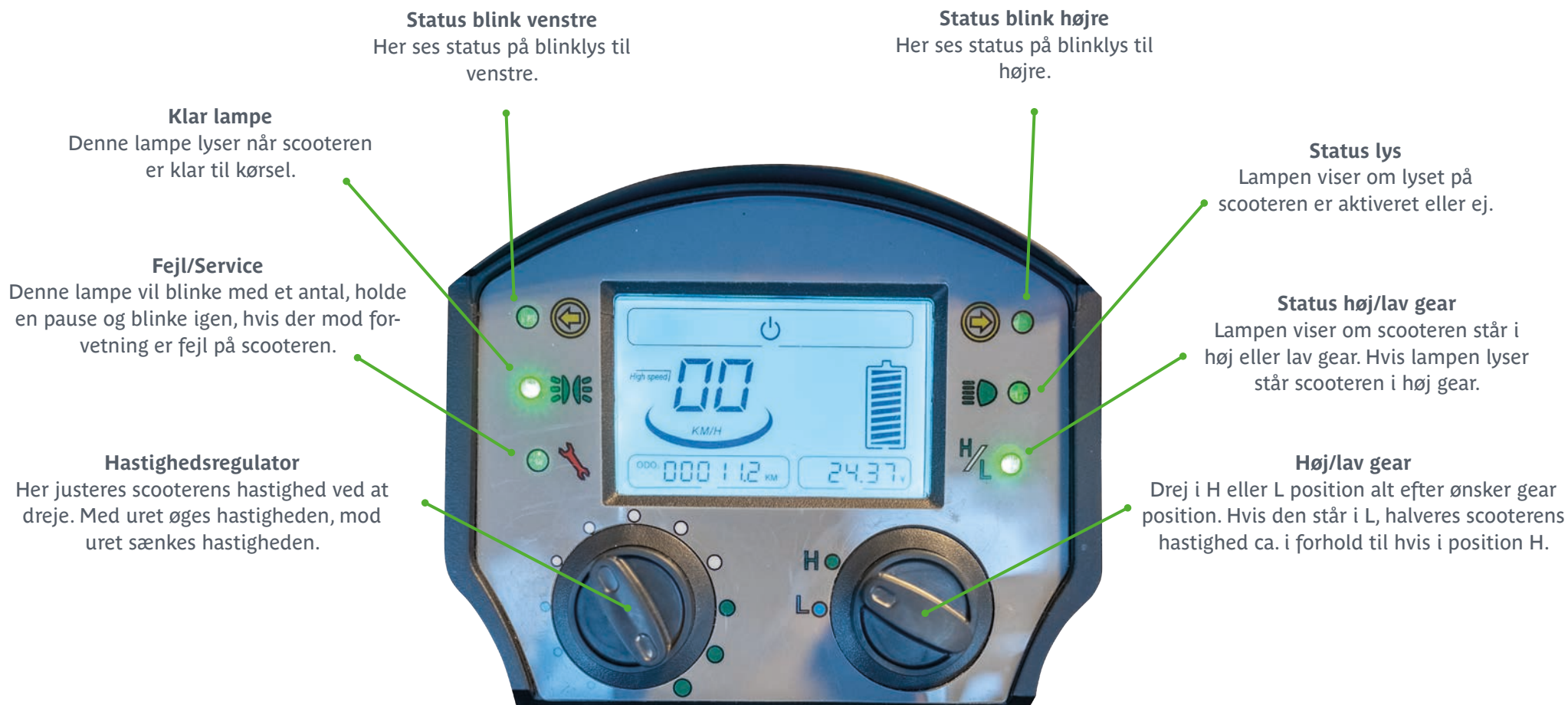

DISPLAY

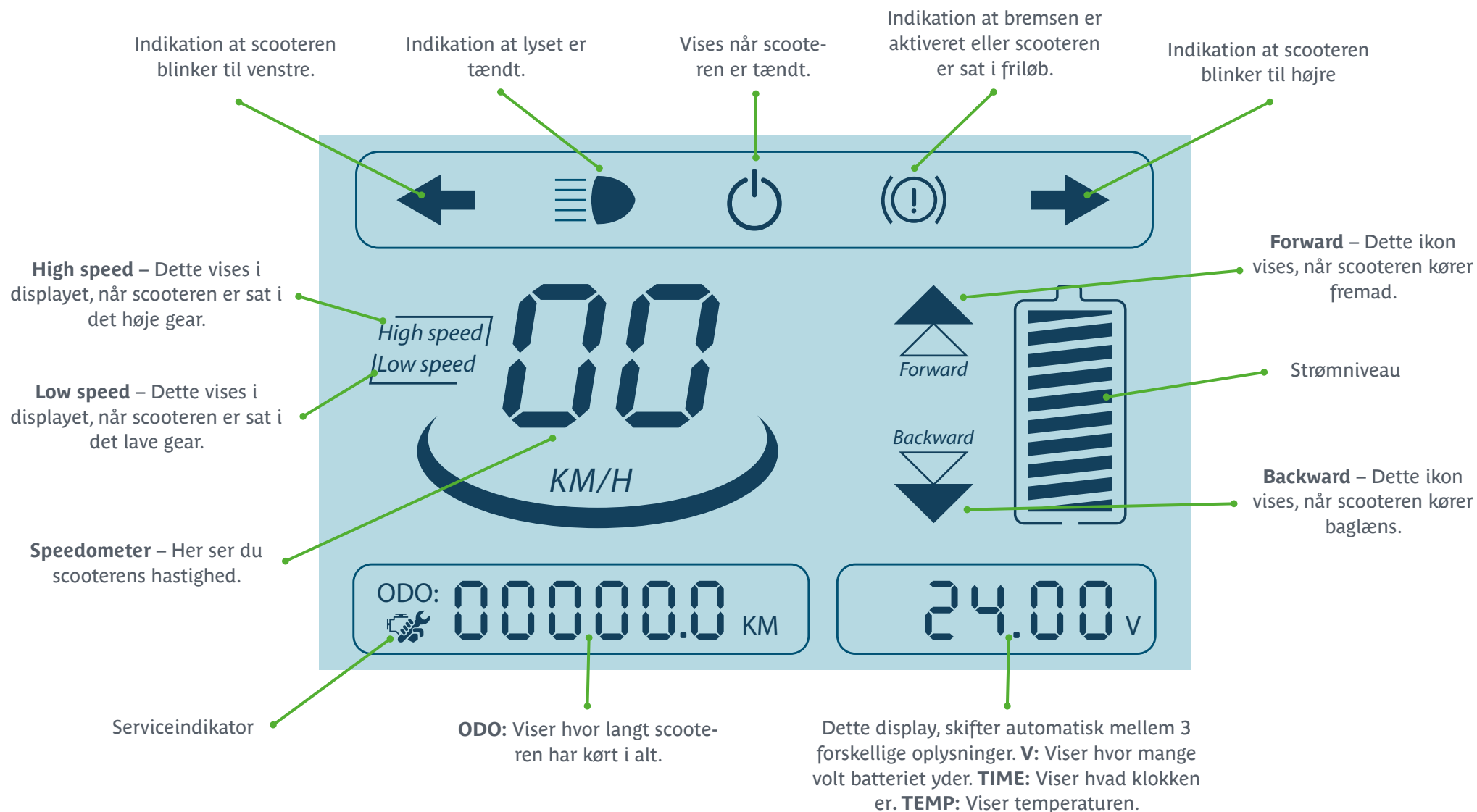

SÅDAN INDSTILLER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

Indstilling af ur, styr m.m.

7

Indstilling af ur

Her er en kort guide til hvordan du indstiller uret på din elscooter.

Trin 1 - Hold „Tænd/sluk lys“ knappen nede, indtil timeviseren begynder at blinke. Brug „Blink til venstre“ og „Blink til højre“ knappen til at ændre timerne.

Trin 2 - Når timerne står korrekt, skal du trykke en gang på „Tænd/sluk lys“ knappen, så minutviseren begynder at blinke. Brug „Blink til venstre“ og „Blink til højre“ knappen til at ændre minutterne.

Trin 3 - Når minutterne står korrekt, skal du igen holde „Tænd/sluk lys“ knappen inde, indtil minutviseren stopper med at blinke. Så er du færdig med at indstille dit ur.



8

Indstilling af styr og kopholder

Scooteren er udstyret med justerbart styr, så du nemt kan tilpasse den til dig. Du skal blot trykke og holde ned på håndtaget lige under styret. Så kan du enten trække styret mod dig selv eller skubbe det væk fra dig selv. Slip håndtaget ingen, når styret har den ønsket indstilling.



Ønsker du at benytte kopholderen, skal du blot trække ned i den, for at folde den ud. Skub ligeledes op i den, for at folde den sammen igen.

BATTERI OG FRIKOPLING

9

Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdelsesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens max rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.


10

Frikopling

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scooterens bagkåbe markeret med et "N/D" klistermærke. N = Frikoplet / D = Klar til at køre.

Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund, for at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke i bund vil scooteren ikke køre. Sluk scooteren, tryk håndtaget i bund og tænd igen for scooteren.

I tilfælde af, at der er strøm på din scooter, kan scooteren skubbes ved hjælp af frikoblingsknappen på instrumentbordet.

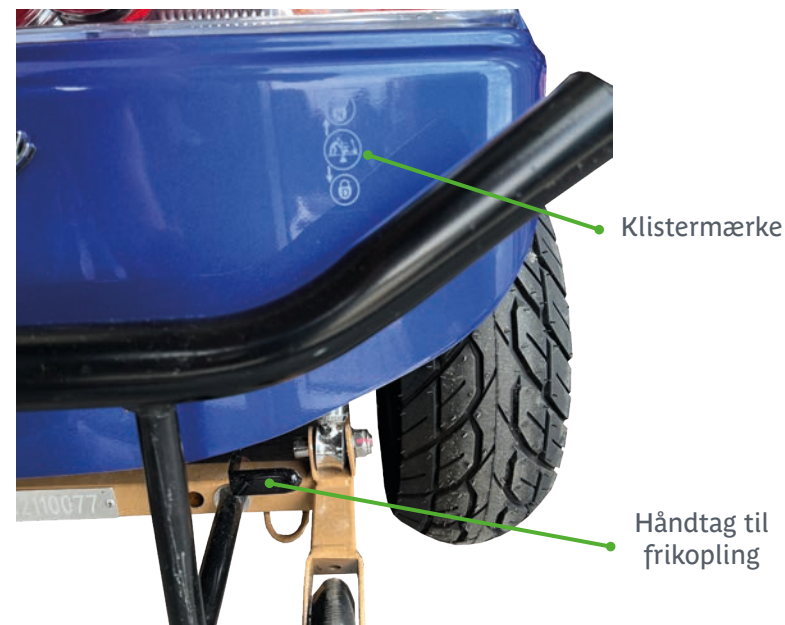

Klistermærke

Håndtag til
frikopling

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om det ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre




VIGTIGE INFORMATIONER

10 Ladestik

Scooterens ladestik sidder placeret på højre side af styrstammen, lige under tændingslåsen. Her indsætter du den runde ende af opladeren. Vær opmærksom på om den bliver sat ordentligt ind. Husk at sætte scooteren til opladning efter hver endt tur.

Når du skal have opladeren ud, trækker du blot stikket ud.

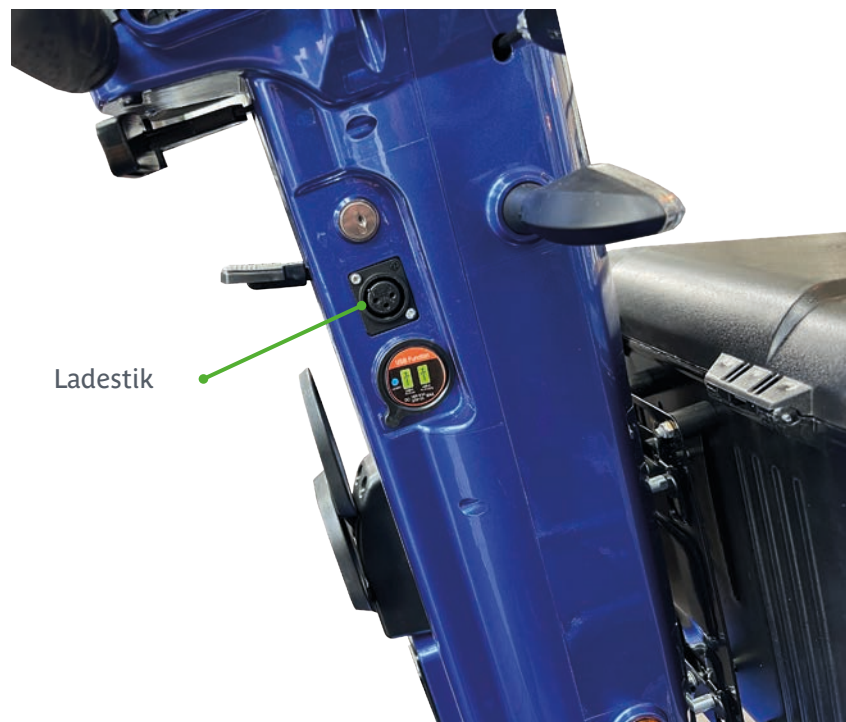

11 Nødbremse (LM-550 - LM-700)

LM-550 til LM-700 er udstyret med en nødhåndbremse. Den bremse er udelukkende til nødstilfælde. Bruges nødbremsen kan det forekomme, at bremsen låser helt og scooteren ikke kan køre videre. Kontakt her en Lindebjerg tekniker. Dette dækkes ikke af garantien.



SÆDETYPER

Kaptajn sæde:



Tilbehørsmontering

Kaptjansæde har mulighed for at få monteret Lindebjergs originale tilbehørs dele, via det integreret beslag i sædet. Lindebjergs aktuelle tilbehørs program kan ses i vores brochure og på www.lindebjerg.dk

CITY KABINESCOOTER

Lindebjergs kabinescooter har yderligere funktioner udover de før nævnte i denne manual. De yderligere funktioner er vist herunder.

9 Påfyldning af sprinklervæske

Beholderen til sprinklervæske sidder placeret inde i kabinen, til venstre for styret. Her kan du nemt skue låget af og påfylde sprinklervæske. Kabinescooteren bruger samme sprinklervæske som biler, det kan købes på din lokale tankstation eller supermarked.

10 El-varme, Vinduesvisker & Sprinklervæske

El-varmen tændes og slukkes ved, at trykke på knappen til højre for styret. Vinduesviskerne tændes ved, at dreje på knappen placeret til højre for styret. Sprinklervæsken aktiveres, ved at holde „Sprinkler“ knappen inde, indtil du vurderer ruden er tilpas fyldt med sprinklervæske. Bemærk: Ved brug af El-varme nedsættes den normale kørerækkevidden væsentligt og er udelukkende til at holde foruden dugfri.

Påfyldning af
sprinklervæske

Sprinklervæske



Tænd/sluk af varme

Vinduesvisker



11 Fjernbetjent centrallås

Til kabinescooteren, medfølger en fjernbetjening til at låse og åbne dørene. Tryk på knappen markeret med „Lås op“ for at låse dørene op. Tryk på knappen markeret med „Lås“ for at låse drønene igen.



Knap 1 – Lås

Knap 2 – Lås op


NØGLEFRI BETJENING (LM650-LM700)

10 Nøglefri betjening

LM650-LM700, er udstyret med nøglefri betjening. Hvilket betyder, at der ikke følger en nøgle med. Scooteren er i stedet udstyret med en fjernbetjening. For at scooteren kan tænde, skal fjernbetjeningen være tæt på scooteren. Når fjernbetjening er et stykke væk fra scooteren, kan den ikke tænde.

11 Fjernbetjening

Her ser du fjernbetjeningen til scooteren. Den skal vi bruge til at låse din scooter op og låse den igen.

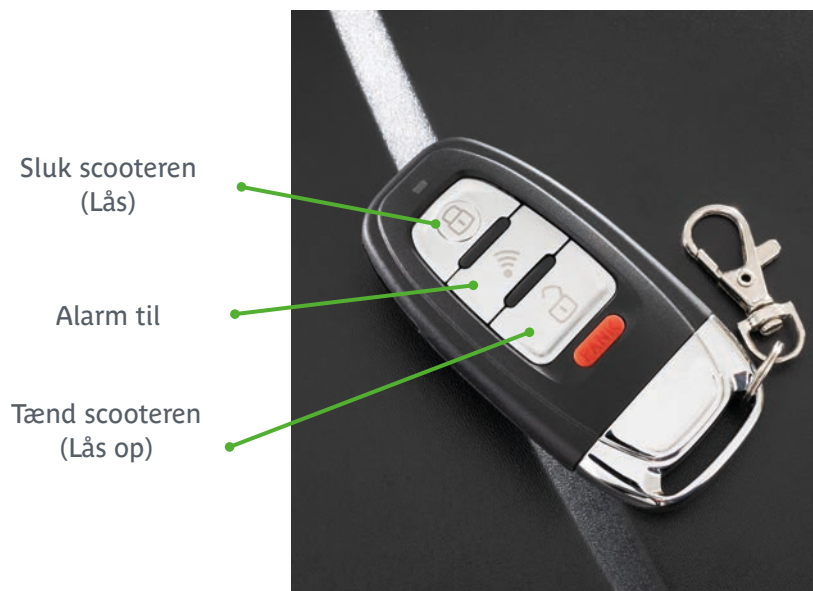

12 Alarm

Scooteren er udstyret med et alarmsystem. Når du trykker „Lås“ på din fjernbetjening, slår alarmeren også til. Hvis der er nogle som prøver at tænde eller skubbe i din scooter, så vil alarmeren gå i gang (Hvis alarmeren går i gang, kan du slå den fra ved at trykke på „Lås op“). Når du låser den op igen, vil alarmeren automatisk slå fra. Husk at låse din scooter op, før du sætter dig på den, så alarmeren ikke går igang.

13 Tænd scooteren

Når du har låst din scooter op, så er du klar til at tænde den. Det kan du gøre på 2 måder. Du kan trykke et kort tryk på „Tænd scooteren“ knappen på din fjernbetjening, eller trykke på start/stop, som sidder under styret på højre side.

For at slukke din scooter, kan du trykke på „Tænd/stop“ på scooteren, eller trykke på „Lås op“ knappen på fjernbetjeningen. Så slukker scooteren.



FEJLSØGNING

Problem	Fejl	Løsning
Scooteren kan ikke køre. Den blinker en gang.	Batterispændingen er for lav.	Sæt scooteren til opladning.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 4 gange.	Motoren er frikoblet, så du kan skubbe med scooteren.	Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 6 gange.	Opladeren er forbundet til scooteren.	Sluk scooteren - Træk stikket ud af scoote- ren. Vent 2 sek. og tænd igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 7 gange.	Speederen er aktiveret for hurtigt eller står ikke neutral.	Sluk scooteren. Tænd herefter igen og vent ca. 2 sek. før speederen aktiveres.
Scooteren stopper pludseligt under kørsel.	Dårlig batteriforbindelse.	Tjek batteristik. Evt. kontakt Lindebjerg.
Scooteren taber fart under kørsel.	Dårlig forbindelse i fartpotentiometer.	Drej hastighedsjusteringsknap frem og tilbage, da forbindelsen kan forringes ved sjælden brug.
Scooteren kører kort på en opladning.	Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, blødt underlag, kulde, eller meget start og stop.	Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt underlag. Skift evt. batterierne.
Scooteren vil ikke lade op.	Aflæsningsfejl.	Ladestatus skal ses på selve opladeren.
Scooteren vil ikke lade op, men kører fint.	Sikring er sprunget i opladeren.	Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.
Opladeren virker ikke.	Opladeren får ikke noget strøm.	Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.
Scooteren kører for langsomt.	Scooterens lave gear er aktiveret.	Tryk på gearkontakten.
Scooteren holder konstant med baglys.	Lyset er parkeringslys og slukkes under kørsel.	Der er ikke tale om en fejl.

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, medmindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affjedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjergs produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.