



**BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS**

**LM-800**



TD-ES-800-05-24-V01

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*






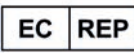







# INDHOLDSFORTEGNELSE

Forklaring af symboler .....	Side 4-5
Introduktion .....	Side 6
Sikkerhed/Forholdsregler .....	Side 7
Sådan oplader du din Lindebjerg scooter .....	Side 8
Sådan kører du sikkert Lindebjerg scooter .....	Side 9-10
Ratstamme .....	Side 11
Instrumentbord .....	Side 12
Instrumentbord forklaring .....	Side 13
Display.....	Side 14
Display forklaring.....	Side 15
Funktioner .....	Side 16-17
Indstilling af ur.....	Side 18
Batteri og frikopling .....	Side 19
Få mere ud af dit batteri .....	Side 20
Vigtige informationer .....	Side 21
Sædetype.....	Side 22
Nøglefri betjening .....	Side 24
Fejlsøgning .....	Side 25
GPS .....	Side 26-27
Garanti og service.....	Side 30
Serviceskema.....	Side 31

# FORKLARING AF SYMBOLER

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Fabrikant		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
CE- mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er i overensstemmelse med alle relevante EU lovkrav til medicinsk udstyr	Mærkat Brugermanual
Medicinsk udstyr		Produktet er medicinsk udstyr klasse 1	Mærkat
Brugermanual		Læs brugsanvisning inden brug!	Mærkat Brugermanual
Reference nummer		Internt varenummer	Mærkat
EC REP		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
Serienummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Belastning		Max brugervægt	Mærkat
Afskaffelse		Produktet må ikke smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt.	Mærkat

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Frikopling		Frikopling af motorbremsen	Mærkat
Bortskaffelse		Ved bortskaffelse af produkt	Mærkat
Rygning		Rygning i nærheden af scooteren er forbudt	Mærkat
Åben ild forbudt		Åben ild tæt på scooteren forbudt	Mærkat







# INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer om vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarseloplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

## Mærkat

<b>”Modelnavn”</b>						
	IMPORTØR: <b>LINDEBJERG AS</b> Stensgaardvej 14, DK-5500 Middelfart www.lindebjerg.dk - tlf. 63 15 00 00 SRN nr.: DK-IM 00003926					
	SUNGO Cert GmbH Add: Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germany Contact: Frank Xu (M) Tel: +49 (0)211 9763413 E-mail: ec.rep@sungogroup.com					
   	<table border="1"><tr><td>SN</td></tr><tr><td>Varenr.</td></tr><tr><td>Max. brugervægt:</td></tr><tr><td>Egenvægt:</td></tr><tr><td>Hastighed: 15 km/t</td></tr></table>	SN	Varenr.	Max. brugervægt:	Egenvægt:	Hastighed: 15 km/t
SN						
Varenr.						
Max. brugervægt:						
Egenvægt:						
Hastighed: 15 km/t						
UDI						

## Produktsortiment

Produktnavn	Varenr.
LM-800 - Rød	129501-A
LM-800 - Blå	129502-A

# SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

## Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Kør aldrig over 6 km/t på fortov, gågader eller indendørs.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

## Batteri instruktioner:

**VIGTIG!** Læs opladningsinstruktionerne på side 8 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis scooterens batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

## Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

### Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.  
Sæt elscooteren til opladning.

### Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.  
Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

### Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

# SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

4

## Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som følger med ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens lade stik. Forsikrer dig om at stikket er skubbet helt i.



**Oplader LM-600 - LM-800 + City:** 111112 - Oplader 24V, 8A  
**Vejrbestandig oplader:** 111110 - Oplader 24V, 8A, vejrbestandig

Du skal blot sætte ledningen i stikkontakten og i scooteren. Så opladningen i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive gul. Når opladningen er fuldstændt, vil den gule lysdiode skifte til grøn. Derudover kan du se hvor mange procent scooteren er opladt.



Du skal sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade scooteren stå til strøm hele tiden.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke scooteren stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om lade status under opladning, men kun under kørsel.

*BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbestandig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.*



# SÅDAN KØRER DU SIKKERT LINDEBJERG ELSCOOTER

**Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – Tjek at du har det korrekte lufttryk i dine dæk ca. ( 2,5 – 3 bar ) og at lys, bremses og styretøj fungerer**

## 5 Før kørsel:

- Tjek altid at scooteren er slukket, før du sætter dig op på den.
- Tjek at sidespejlene er indstillet korrekt.
- Husk at tage armlænene ned inden kørsel. De kan nemt tages op og ned for nem indstigning på scooteren.
- Har du benyttet drejefunktion på sædet, skal du sikre dig til det er i låst tilstand.

## 6 Tænd scooteren:

Scooteren er med nøglefri betjening. Du tænder nemt scooteren, enten ved at trykke på „Lås op“ på fjernbetjeningen eller når du har nøglen på dig og trykke på „Start/stop“ knappen på scooteren.

Tryk igen på „Start/stop“ knappen på scooteren for at slukke igen. Eller tryk på lås knappen på fjernbetjeningen. (Sluk altid scooteren inden du træder ned.)



Start/stop knap

Lås op

## 7 Lær scooteren at kende

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start i lav gear og lav hastighed, indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner.



Bemærk – hvis du trykker stille og roligt vil du opnå en mere jævn kørsel. Undgå at trykke speederen hurtigt helt i bund eller slippe den i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration og en kraftig nedbremsning.



Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

8

## Hvor må jeg køre?



Fodgænger  
0-6 km/t



Cyklist  
6-15 km/t

### Cyklist - 6-15 km/t.

Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven, når du kører over 6 km/t. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.

### Fodgænger - 0-6 km/t.

Kører du med samme fart som en gående, under 6 km/t, må du køre på fortovet, på fodgængerovergange, i gågader, i butikker og storcentre. Alle steder hvor en fodgænger må færdes.

9

## Tegngivning og lys

**Bremselys:** Når du slipper speederen, vil scooteren bremselys bagpå automatisk tænde. Bremselyset vil være tændt, indtil du trykker ind på speederen igen.

**Blinklys:** Når du skal dreje, kan du enten vælge at bruge scooterens indbygget blinklys eller du kan vælge at give tegn med hånden. Vi anbefaler at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys. Du tænder scooterens blinklys ved at trykke på henholdsvis pil til venstre og pil til højre. Du slukker blinklyset ved at trykke på pil til venstre og pil til højre endnu en gang.

**Kørellys:** Da scooteren anses for at være en cykel, skal du køre med lyset tænd i lygtetændingstiden. Det er fra solnedgang til solopgang. Du trykker blot 1 gang på „Tænd/sluk lys“ knappen. Så tænder lyset foran og bagpå. Tryk igen på „Tænd/sluk lys“ knappen for at slukke lyset igen.

**OBS!** Slukker du scooteren imens lyset er tændt, så går der 30 sekunder og så vil lyset slukke af sig selv.



# RATSTAMME



# INSTRUMENTBORD



1. Høj/lav gear
2. Frikobling
3. Blink til venstre
4. Multimedia tænd/sluk
5. Multimedia skift mode (FM/Bluetooth)
6. Tilbage/indstilling knap
7. OK knap
8. Atmosfære lys
9. Hastighedsregulator

10. Horn
11. Venstre / forrige sang
12. Højre / næste sang
13. Lyd op
14. Lyd ned
15. Tænd/sluk lys
16. Katastrofeblink
17. Blink til højre

# INSTRUMENTBORD FORKLARING

## 1. Høj/lav gear

Tryk en gang for knappen, for at skifte mellem højt og lavt gear. Lavgear er til indendørskørsel og smalle steder og højgear er til cykelstier eller på vejen.

## 2. Frikobling

Tryk en gang for at slå den elektriske motorbremse fra. Det vil sige, at du kan skubbe scooteren, hvis du skal have den ind i et skur eller andet. Tryk igen for at slå motorbremsen til igen. Scooteren kan ikke køre, når den er slået fra.

## 3. Blink til venstre

Tryk en gang for at starte blinklyset til venstre. Tryk igen for at slå fra.

## 4. Multimedia tænd/sluk

Hold knappen nede i 3 sekunder, for at tænde multimedia systemet. Læs mere på side 17.

## 5. Multimedia skift mode (FM/Bluetooth)

Tryk en gang for at skifte mellem radio, Bluetooth og USB. Læs mere på side 17.

## 6. Tilbage/indstilling

Tryk en gang kort, for at bruge tilbage funktionen i indstillingsmenuen. Tryk og hold i 3 sekunder, for at åbner indstillinger.

## 7. OK knap

Tryk en gang kort, for at bruge „OK“ funktionen i indstillingsmenuen.

## 8. Atmosfære lys

Tryk en gang for at tænde atmosfæreliset, nede ved benene.

## 9. Hastighedsregulator

Drej på knappen for trinløst at justere din hastighed.

## 10.Horn

Tryk en gang for at aktivere hornet

## 11. Venstre / forrige sang

Tryk en gang for at skifte til forrige sang eller brug den til at navigere i indstillingsmenuen. Læs mere på side 17

## 12.Højre / næste sang

Tryk en gang for at skifte til næste sang eller brug den til at navigere i indstillingsmenuen. Læs mere på side 17

## 13.Lyd op

Tryk en gang for at skrue op for lydstyrken. Den går fra 0-20

## 14.Lyd ned

Tryk en gang for at skure ned for lydstyrken. Den går fra 0-20

## 15.Tænd/sluk lys

Tryk en gang for at tænde lyset på scooteren. Dette skal være tændt i lygtetændingstiden.


## 16.Katastrofeblink

Tryk en gang for at aktivere katastrofeblinket. Dette bruges, hvis du går i stå ude på offentlig vej.

## 17.Blik til højre

Tryk en gang for at starte blinklyset til højre. Tryk igen for at slå fra.

# DISPLAY

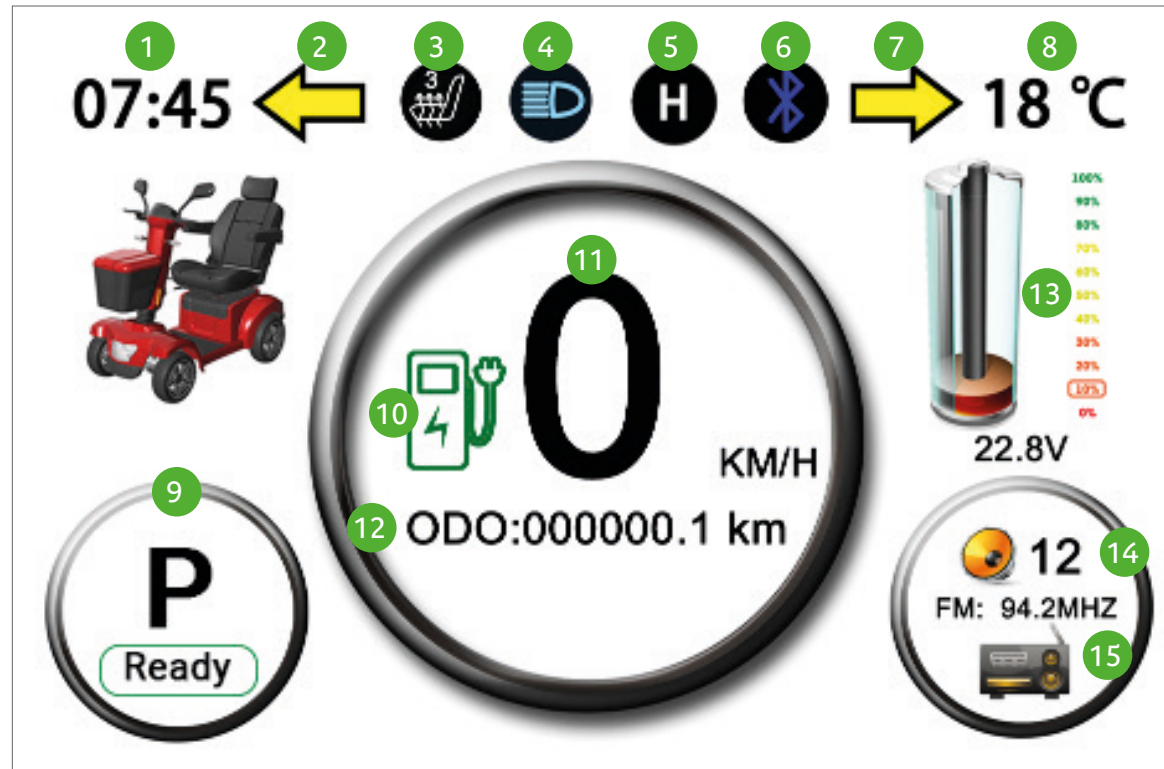

1. Ur
2. Blink indikator venstre
3. Sædevarme indikator (1,2 eller 3)
4. Lys indikator
5. Høj/lav gear indikator
6. Bluetooth indikator
7. Blink indikator højre
8. Temperatur viser

9. Scooter status / fejlkoder
10. Lavt batteri indikator
11. Hastighed
12. Total kørte kilometer
13. Batteriniveau
14. Lydstyrke
15. Multimedia mode indikator (FM/USB/Bluetooth)

# DISPLAY FORKLARING

## 1. Ur

Viser klokken og dato. Læs side 18 for indstilling af ur.

## 2. Blink indikator venstre

Dette ikon bliver vist i toppen af displayet, når du blinker til venstre.

## 3. Sædevarme indikator (1,2 eller 3)

Dette ikon bliver vist i toppen af displayet, når sædevarmen er aktivt. Tallet inde i ikonet viser hvilket niveau varmen er på (1-3)

## 4. Lys indikator

Dette ikon bliver vist i toppen af displayet, når lyset på scooteren er tændt.

## 5. Høj/lav gear indikator

Dette ikon viser om elscooteren er i højt eller lavt gear. H = højt gear  
L = Lavt gear.

## 6. Bluetooth indikator

Dette ikon bliver vist i toppen af displayet, når din telefon er tilsluttet til elscooteren.

## 7. Blink indikator højre

Dette ikon bliver vist i toppen af displayet, når du blinker til højre.

## 8. Temperatur viser

Her vises den aktuelle temperatur.

## 9. Elscooter status / fejlkoder

Her vises „Ready“ hvis scooteren er klar til brug. Derudover viser den P = parkeret, D = køre fremad, R = bak, N = Neutral

## 10. Lavt batteri indikator

Dette ikon vises kun, når elscooteren har lavt batteri og skal sættes i en oplader hurtigst muligt.

## 11. Total kørte kilometer

Her vises hvor langt elscooteren har kørt i alt.

## 12. Batteriniveau

Her vises elscooteren batteri i procent fra 0-100%. Når batteriet bliver rødt, skal du sætte den til opladning. Husk at sætte elscooteren efter hver endt kørsel.

## 13. Lydstyrke

Her vises lydstyrken for multimedia systemet.

## 14. Multimedia mode indikator (FM/USB/Bluetooth)

Her vises hvilket mode multimedia system i er. Læs mere på side 17.

# FUNKTIONER

## 10 Sædevarme

Sædevarmen har 3 forskellige varme niveauer. Tryk en gang på sædevarme knappen under styret, for at tænde sædevarmen. Når du tænder sædevarmen, starter den i fuld varme (niveau 3) og lyser i alle 3 dioder.

Tryk endnu engang for at sænke til et mindre varme niveau. For at slukke sædevarmen, skal du trykke på knappen indtil alle dioderne ikke lyser mere.




Sædevarme knap



## 11 USB-indgange

Der er 2 USB-indgange under styret på scooteren. Det ene stik er til multimedia funktionen, hvor du kan sætte et USB stik i med musik. Det andet USB-stik er til opladning af din telefon.

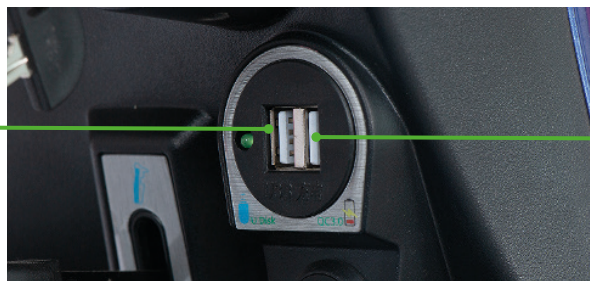

USB til multimedia

USB til opladning

## 12 Taskekrog


Scooteren er udstyret med en taskekrog, så din taske ikke ryge af under kørsel. Du trykker blot ind i bunden af metalstykker, for at du krogen frem. OBS! Krogen kan maks tage 2,5 kg.




Tryk her

## 13 Bluetooth

For at tilslutte din telefon til elscooterens Bluetooth, skal du åbne Bluetooth indstillingerne på din telefon og søge efter enheder. Elscoters Bluetooth hedder „scooter“. Paringskoden er „0000“.

Når din telefon er succesfuldt tilkoblet, vises  i toppen af elscooterens display.

Når din telefon ringer, vises dette ikon i toppen af displayet . Tryk på „OK“ knappen for at tage telefonen eller tryk på „Tilbage“ for at afvise opkaldet.

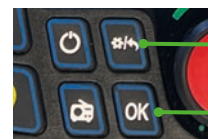

Afvís opkald

Tag opkald



14

## Multimedia system

Scooteren er udstyret med et multimedia, hvor du kan høre FM radio  
- Musik via Bluetooth - Video og musik via USB-stik.

For at tænde Multimedia funktionen, skal du holde „Tænd/sluk“ knappen nede i 3 sekunder. Derefter skal du vælge mode, det gør du ved at trykke på „Skift mode“ knappen. Du kan vælge mellem følgende modes:



FM RADIO




Bluetooth musik



USB MUSIK  
(MP3 filer)



USB VIDEO  
(MP4 filer)

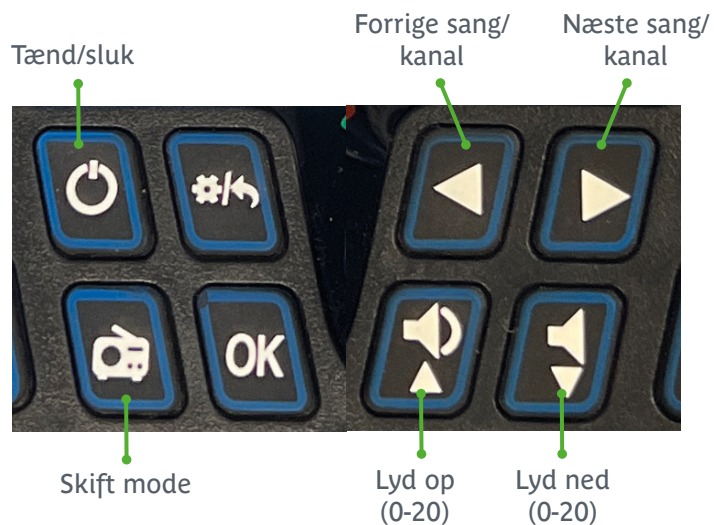

For at slukke multimedia systemet, holder du igen „Tænd/sluk“ knappen nede i 3 sekunder.



15


## Indstilling af styr

Scooteren er udstyret med justerbart styr, så du nemt kan tilpasse den til dig. Du skal blot trykke ned på håndtaget, lige under styret. Så kan du enten trække styret mod dig selv eller skubbe det væk fra dig selv. Slip håndtaget ingen, når styret har den ønskede indstilling.



# INDSTILLING AF UR

Her er en kort guide til hvordan du indstiller uret på din elscooter. For at åbne indstillingerne, hvor du indstiller uret, skal du holde „Tilbage/indstilling“ knappen nede i 3 sekunder, eller indtil indstillingerne kommer frem i midten af displayet.

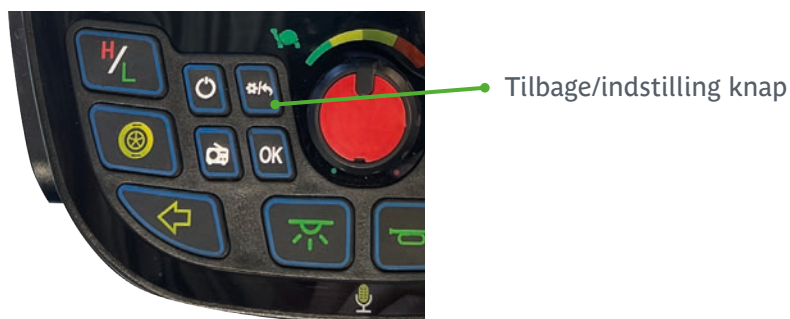


## Navigation i indstilling

Du skal bruge følgende knapper til at navigere rundt i indstillingerne. Brug pilene til at rykke det grønne felt rundt i menuen. Tryk på „OK“ knappen, for at komme videre ind i en menu.




## Trin 1:

Tryk 1 gang på „pil ned“ knappen, til at flytte det grønne felt ned på „System“ i menuen. Tryk derefter på „OK“ knappen.

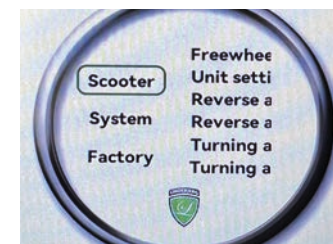

## Trin 2:

Tryk 3 gange på „pil ned“ for at rykke det grønne felt ned på „Local settings“ og tryk på „OK“ knappen.

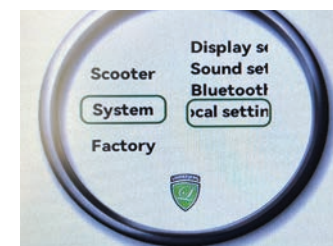

## Trin 3:

Tryk 1 gang på „pil ned“ for at rykke det grønne felt ned på „Time and Date“ og tryk på „OK“ knappen.



## Trin 4:

Brug „pil op“, „pil ned“ og „OK“ til at indstille År, måned, dag, timer og minutter.

Tryk og hold „tilbage/indstilling“ knappen nede i 5 sekunder, for at lukke menuen.



# BATTERI OG FRIKOPLING

16

## Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdelsesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens max rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.

**HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.**


17

## Frikopling

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scooterens bagkåbe markeret med et "N/D" klistermærke. N = Frikoplet / D = Klar til at køre.

Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund, for at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke i bund vil scooteren ikke køre. Sluk scooteren, tryk håndtaget i bund og tænd igen for scooteren.

I tilfælde af, at der er strøm på din scooter, kan scooteren skubbes ved hjælp af frikoblingsknappen på instrumentbordet.

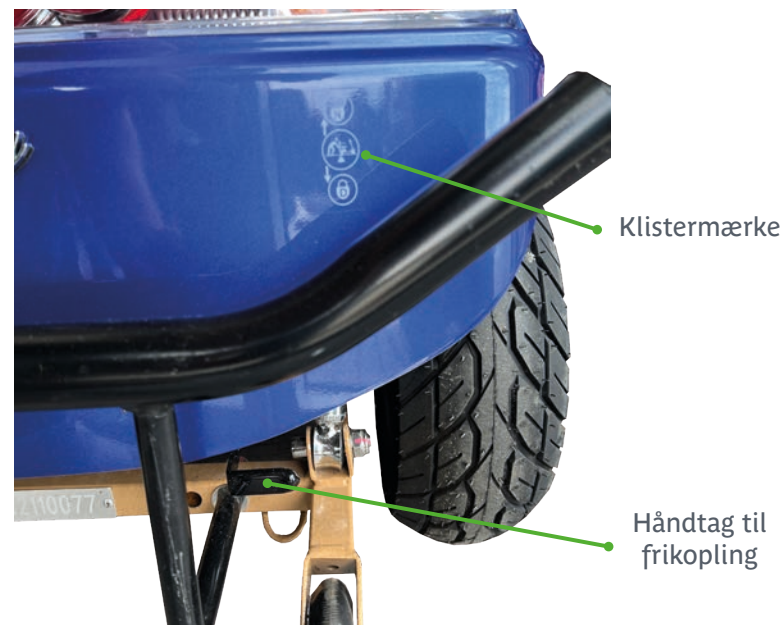

Klistermærke

Håndtag til frikopling

## Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om det ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu  
klar til  
at køre



# VIKTIGE INFORMATIONER

## 18 Ladestik

Scoterens ladestik sidder placeret på højre side af styrstammen, lige under tændingslåsen. Her indsætter du den runde ende af opladeren. Vær opmærksom på om den bliver sat ordentligt ind. Husk at sætte scooteren til opladning efter hver endt tur.

Når du skal have opladeren ud, trækker du blot stikket ud.



Ladestik

## 19 Nødbremse (LM-800)

LM-800 er udstyret med en nødhåndbremse. Den bremse er udelukkende til nødtilfælde. Bruges nødbremsen kan det forekomme, at bremsen låser helt og scooteren ikke kan køre videre. Kontakt her en Lindebjerg tekniker. Dette dækkes ikke af garantien.



Nødbremse

# SÆDETYPE

## Kaptajn sæde:



### Tilbehørsmontering

Kaptjansæde har mulighed for at få monteret Lindebjergs originale tilbehørs dele, via det integreret beslag i sædet. Lindebjergs aktuelle tilbehørs program kan ses i vores brochure og på [www.lindebjerg.dk](http://www.lindebjerg.dk)

# APP

Elscooteren har en APP, hvor du har mulighed for skærmdeling fra telefonen, GPS-navigation og spille musik lokalt fra din telefonen.


## Download app

Appen til elscooteren hedder „EYLINK“ og kan downloades på App-Store og Google Play. Appen er kun på engelsk og appen skal have tilslutning til at bruge GPS og Bluetooth. Når du har downloadet appen, skal du oprette en profil med din mailadresse.



## Tilslutning til elscooteren

Når du kommer ind i appen, vil den bede dig om at „Enable Bluetooth“, når du har trykket på „Enabled“, vil elscooteren være vist under „Select device“. Tryk på den enhedsnavn, som kommer frem. Navnet for enheden vil være forskelligt. (elscooteren skal være tændt)

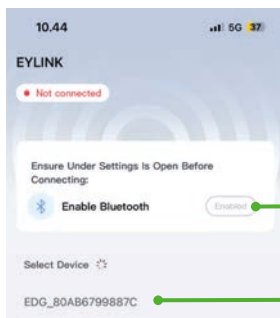


Tryk for at slå Bluetooth til

Tryk på enhedsnavnet for at tilslutte

## Brug appen

Når elscooteren er tilsluttet kommer følgende op på din telefon - Du kan ikke låse telefonen, imens du bruger appen. Du kan vælge mellem de 4 nedenstående funktioner. For at lukke appen på elscooteren skærm, skal du blot lukke appen på din telefon.

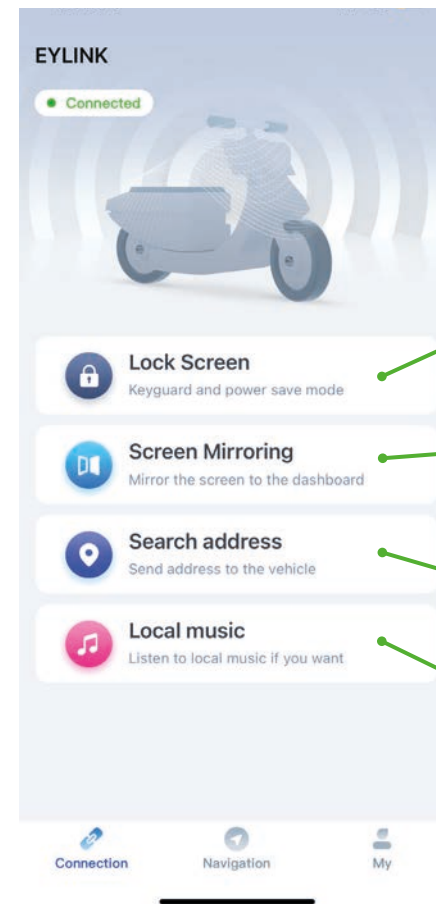

Låser din skærm på telefonen, for at spare på batteriet på din telefon

Spejler din skærm fra telefonen og op på scooterens display

Send en adresse til elscooterens navigation. Denne funktion koster ca. 145 kr. pr. år

Spil musik fra din telefon

# NØGLEFRI BETJENING (LM-800)

## 20 Nøglefri betjening

LM-800, er udstyret med nøglefri betjening. Hvilket betyder, at der ikke følger en almindelig nøgle med. Scooteren er i stedet udstyret med en fjernbetjening. For at scooteren kan tænde, skal fjernbetjeningen være tæt på scooteren. Når fjernbetjening er et stykke væk fra scooteren, kan den ikke tænde.

## 21 Fjernbetjening

Her ser du fjernbetjeningen til scooteren. Den skal vi bruge til at låse din scooter op og låse den igen.

Sluk scooteren  
(Lås)

Tænd scooteren  
(Lås op)



## 22 Alarm

Scooteren er udstyret med et alarmsystem. Når du trykker „Lås“ på din fjernbetjening, slår alarmen også til. Hvis der er nogle som prøver at tænde eller skubbe i din scooter, så går alarmen i gang (Hvis alarmen går i gang, kan du slå den fra ved at trykke på „Lås op“). Når du låser den op igen, vil alarmen automatisk slå fra. Husk at låse din scooter op, før du sætter dig på den, så alarmen ikke går i gang.

## 23 Tænd scooteren

Du kan tænde scooteren på 2 måder. Du kan trykke et kort tryk på „Tænd scooteren“ knappen på din fjernbetjening, eller trykke på start/stop, som sidder under styret.

For at slukke din scooter, kan du trykke på „Tænd/stop“ på scooteren, eller trykke på „Lås“ knappen på fjernbetjeningen. Så slukker scooteren.



Start/stop



# FEJLSØGNING

Se fejkoderne i nederst venstre hjørne af displayet af scooteren.


Fejlkode	Fejl	Løsning
E01	Batterispændingen er for lav.	Sæt scooteren til opladning.
E02	Motortilslutningsfejl	Kontakt Lindebjerg A/S
E03	Motorkortslutning til batteri	Kontakt Lindebjerg A/S
E04	Hastighedsgrænse - 3 handlinger	Kontakt Lindebjerg A/S.
E05	Låst-rotor	Kontakt Lindebjerg A/S
E06	Hastighedsbegrænsning Låsning	Kontakt Lindebjerg A/S
E07	Gasspjældpotentiometer åbent kredsløb/ikke i neutral position	Kontakt Lindebjerg A/S
E08	Intern fejl i drev	Kontakt Lindebjerg A/S
E09	Bremsefejl	Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen. Evt. kontakt Lindebjerg A/S
E10	Batterispænding for høj	Kontakt Lindebjerg A/S
E11	Kommunikationsfejl	Kontakt Lindebjerg A/S
E12	Sædevarmesystem Fejl	Kontakt Lindebjerg A/S

# GPS

Elscooteren har indbygget GPS funktion. Dette kræver du køber et abonnement på et data simkort. Det behøver ikke have taletid og sms'er.

## Montering af simkort

I bunden af elscooteren ratstamme, finder du porten ind til simkortholderen. Det er vigtigt, at det er et micro simkort og det vender korrekt, når det monteres. Når simkortet er monteret, kan der gå op til 30 min. før det er aktiveret.

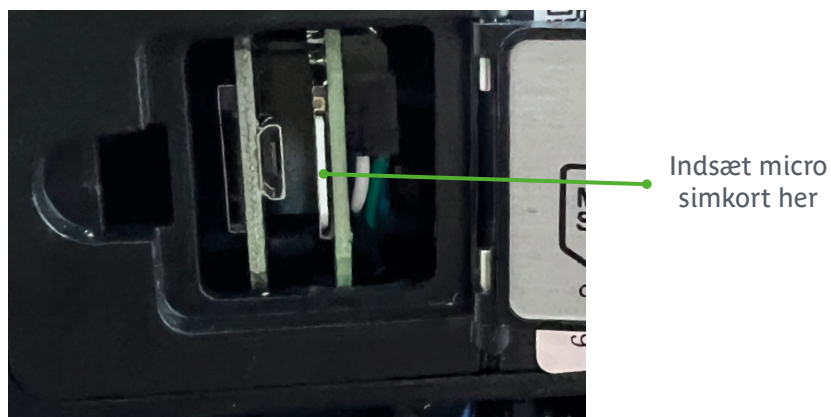


## Download app

Appen til GPS'en hedder „Tracksolid“ og kan downloades på AppStore og Google Play. Appen er kun på engelsk og appen skal have tilladelse til at bruge GPS og Bluetooth. Når du har downloadet appen, skal du oprettet en profil med din mailadresse.



## Tilføj Elscooteren i appen


For at tilføje scooteren i appen, skal du trykke på „List“ i bunden af appen og herefter trykke på „+“ øverst i højre hjørne.

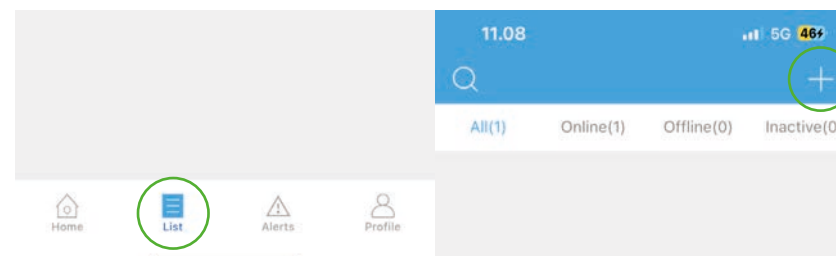

Derefter skal du bruge elscooteren IMEI nummer. Det finder du lige ved siden er simkort porten på elscooteren ratstamme. Nummeret står på et klistermærke, lige efter en QR kode



Skriv elscooteren IMEI nummer ind i appen eller tryk på det lille ikon i højreside af skrivefeltet, for at scanne QR koden. Tryk derefter på „Add Device“. (Der kan gå op til 30 min. før der er forbindelse til elscooteren)

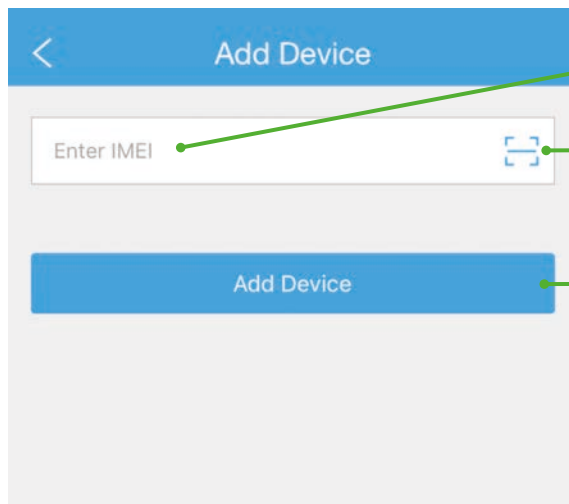

Skriv IMEI nr. her

Tryk her for at scanne QR koden

Tryk her, når du har skrevet IMEI nummeret eller scannet QR koden


## Funktioner i appen

Appen til forskellige funktioner, som er beksrevet herunder.

**Geo Fence:** Vælger du „Geo Fence“, har du mulighed for at opsætte et viatuel område. Kommer elscooteren udenfor dette område, får du en notifikation på din telefon.

**Playback:** Trykker du på „Playback“, kan du se hvor elscooteren har kørt tidligere og elscooterens hastighed tidligere.

**Tracking:** Trykker du på „Tracking“, kan du se elscooteren nuværende position.

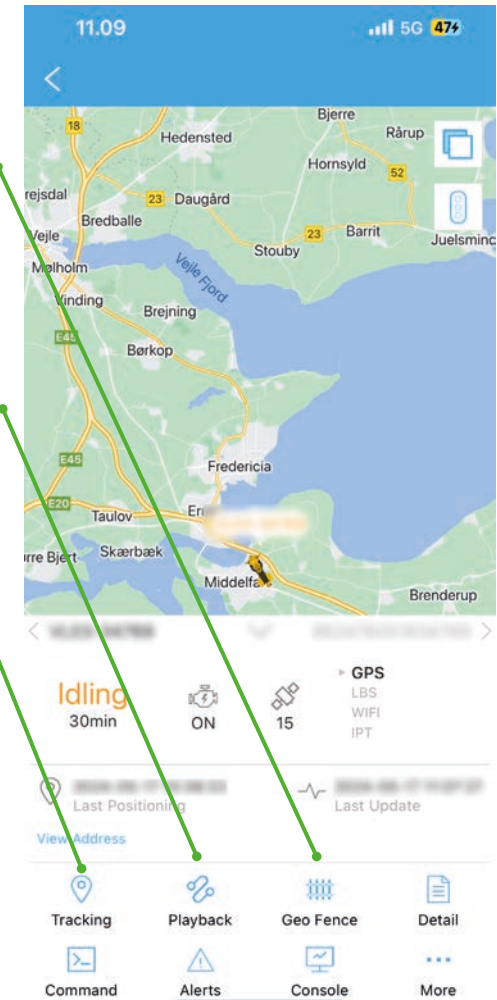





# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremseser, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, medmindre andet er angivet på din sluseddél. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. serviceinterval-lerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din sluseddél/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affjedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjergs produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.