



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

OTIUMSTOL

LS-484

TD -07-LS-484-09-25-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG LÆNESTOL

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner stolen har. Derudover alt hvad du skal, for at vedligeholde din nye lænestol.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Pleje/vedligehold.....	Side 4
Betjening.....	Side 5
Garanti og Service	Side 6

PLEJE / VEDLIGEHOLD

Lindebjerg Otiumstole er udstyret med stof eller læder, alt efter model.

1 Otiumstol - stof

Der behøver du som udgangspunkt ikke pleje. Det er dog muligt at give en imprægnering som holder stoffet pænt i længere tid og letter rengøringen.

2 Otiumstol - læder

Vi anbefaler vi at give en læderpleje. Dette gerne et par gange om året alt efter brug. Dette holder læderet pænt og letter rengøringen af stolen.


3 Rengøring

En lindebjerg Otium stol er udstyret med højkvalitetsstof, i slidstærk styrke, og kan rengøres med en karklud, der er hårdt opvredet i lunken vand. Samme fremgang måde gør sig gældende til Lindebjergs Otium stole med Læder.

Spørg altid Lindebjerg for hjælp, hvis du har problemer med din Otiumstol.

BETJENING

Lindebjerg Otiumstol er udstyret med fjernbetjening til justering af ryk, sæde og stå op funktion.

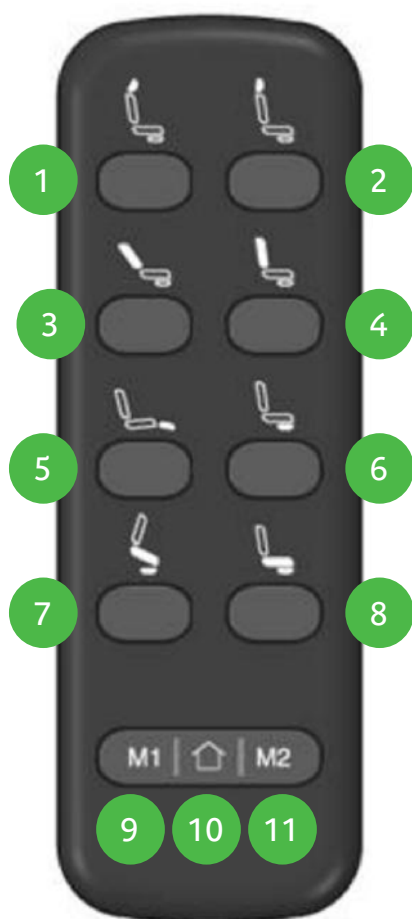

FJERNBETJENING

- Knap nr. 1 og 2 styrer nakkestøtten
- Knap nr. 3 og 4 styrer ryglænet
- Knap nr. 5 og 6 styrer fodstøtten
- Knap nr. 10 er Hjem-knappen
- Knap nr. 9 og 11 er hukommelsesknapper

Sådan indstiller du hukommelsesknappen:

Styr stolen til den ønskede position, tryk på Homeknappen (nr. 10) og M1 (nr. 9) samtidig i 3 sekunder.

Når LED-lampen mellem disse 2 knapper blinker, er M1 OK.

Samme operation for M2.

GARANTI OG SERVICE

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; betræk eller motere etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din lænestol leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Købsdato: _____





Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.